

# CORMAY RF CALIBRATORS

## КАЛИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА



<b>Название</b>	<b>Размер</b>	<b>Кат. No</b>
CORMAY RF CALIBRATORS	4 x 1 ml	4-277

### ВВЕДЕНИЕ

Ревматоидный фактор (RF) представляет собой аутоантитела против IgG человека, широко встречающихся в сыворотке в высоких концентрациях при некоторых условиях, в частности у пациентов с ревматоидным артритом. Определение значений RF полезно при оценке диагноза, эффектов терапии и прогнозе ревматоидного артрита, системной красной волчанке, хронической гепатопатии и т.д.

Набор калибраторов CORMAY RF CALIBRATORS приготавливается разведением различных концентрации ревматоидного фактора в буферном растворе, содержащем сывороточный альбумин быка. Концентрации указаны на каждом флаконе и в данной инструкции к набору.

Набор CORMAY RF CALIBRATORS должен использоваться для калибровки определений ревматоидного фактора.

### УПАКОВКА

Цвет крышки	RF уровень	Размер
ГОЛУБОЙ	20 МЕ/мл	1 x 1 мл
ЗЕЛЕНый	40 МЕ/мл	1 x 1 мл
КРАСНЫЙ	80 МЕ/мл	1 x 1 мл
ОРАНЖЕВый	120 МЕ/мл	1 x 1 мл

Калибраторы готовы к использованию

### СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Нераспечатанные калибраторы стабильны при 2-10°C до срока годности, отпечатанного на флаконе.

Вскрытый калибратор, который хранится при температуре 2-10°C, сохраняет стабильность в течение 5 недель.

Хранить от воздействия света.

### ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Продукт только для диагностики in vitro.
- Так как цвета крышечек различаются в соответствии с концентрацией RF во флаконе, следует быть внимательными, чтобы не перепутать флаконы.
- Калибраторы не смешивать с аналогичным в другом флаконе.
- Калибратор использовать в соответствии с инструкцией к набору.
- Калибратор содержит продукты человеческого происхождения, которые были протестированы на наличие антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антитела к ВИЧ и гепатиту С (HCV), и оказались неактивными. Тем не менее, с реактивом необходимо обращаться как с потенциально биологически опасным материалом с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

### ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

RF калибратор производится в соответствии с стандартами ВОЗ.

### УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ

Следуйте местным требованиям безопасности и нормативам.

Дата выпуска: 04. 2012.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**PZ CORMAY S.A.**  
Ул. Вёсэнна 22,  
05-092 Ломянки, ПОЛЬША  
тел.: +48 (0) 22 751 79 10  
Факс: +48 (0) 22 751 79 14  
<http://www.cormay.pl>