

CORMAY ASO CALIBRATOR

КАЛИБРАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О



Название набора	Упаковка	Кат. №
CORMAY ASO CALIBRATOR	1 x 5 мл	4-278

ВВЕДЕНИЕ

Большинство людей инфицированных гемолитическим стрептококком производят антистрептолизин О (ASO): антитела против стрептолизина О (SLO), экзотоксина стрептококков. Измерение уровня ASO является эффективным для диагностики, оценки динамики лечения и реабилитации после заболеваний, вызванных гемолитическим стрептококком, таких как ревматизм, острый гломерулонефрит, скарлатина и тонзиллиты. CORMAY ASO КАЛИБРАТОР приготовлен путем разведения антистрептолизина-о физиологическим раствором, содержащим 1% сывороточного бычьего альбумина до получения разведения 500 МЕ/мл.

CORMAY ASO КАЛИБРАТОР следует использовать для калибровки при определении уровня антистрептолизина-о с применением автоматических биохимических анализаторов.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Калибратор готов к использованию. Нераспечатанный калибратор при 2-10°C сохраняет стабильность в течение всего срока годности, указанного на упаковке.

Вскрытый калибратор, который хранится при температуре 2-10°C, сохраняет стабильность в течение 4 недель.

Предохранять от прямого света.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

- Использовать только для диагностики *in vitro*.
- Не следует смешивать калибраторы из разных флаконов.
- Калибратор следует использовать в соответствии с инструкцией к набору реагентов.
- Калибратор содержит продукты человеческого происхождения, которые были протестированы на наличие антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антитела к ВИЧ и гепатиту С (HCV), и оказались нереактивными. Тем не менее, с реактивом необходимо обращаться как с потенциально биологически опасным материалом с соблюдением всех необходимых мер предосторожности!
- Продукт содержит азид натрия (< 0,1 %) в качестве консерванта. Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.

ТРАССИРУЕМОСТЬ

В качестве эталонного метода при производстве ASO калибратора были использованы стандарты ВОЗ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с локальными требованиями.

Дата создания: 03. 2012.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

PZ CORMAY S.A.
ul. Wiosenna 22,
05-092 Łomianki, POLAND
tel.: +48 (0) 22 751 79 10
fax: +48 (0) 22 751 79 14
<http://www.pzcormay.pl>