

# CORMAY IMMUNO-CONTROL III

## КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА



CORMAY IMMUNO-CONTROL III 1 x 2 мл Кат.№ 4-291

### НАЗНАЧЕНИЕ

CORMAY IMMUNO-CONTROL III предназначается для использования как мультианалит контрольная сыворотка при измерении различных белков в сыворотке человека. Используйте в соответствии с инструкциями к реагентам для определения специфических белков.

### CHARACTERISTICS

CORMAY IMMUNO-CONTROL III является человеческой жидкостью с буфером HEPES (pH 7,4), содержащей стабилизаторы, азид натрия (<1 г/л) и следующие белки человека: альбумин, альфа-1 антитрипсин, альфа-1 кислый гликопротеин, альфа-2 макроглобулин, антитромбин III, комплемент C3, комплемент C4, церулоплазмин, гаптоглобин, IgA, IgG, IgM, преальбумин и трансферрин.

### ПОДГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ

Калибраторы готовы к использованию.

При 2-8°C калибраторы стабильны до даты, указанной на упаковке. Храните закрытыми, избегайте контаминации.

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Продукт только для диагностики in vitro.
2. Калибраторы должны использоваться только по назначению, квалифицированным лабораторным персоналом в соответствующих лабораторных условиях.
3. Этот калибратор был протестирован на антитела к ВИЧ, HBsAg и HCV и оказался нереактивным. Однако с этим материалом следует обращаться как с потенциально инфицированным.
4. Калибраторы содержат азид натрия (< 1г/л) в качестве консерванта. Избегайте контакта с кожей и слизистыми оболочками.

### ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Заданные значения по специфическим белкам меняются от лота к лоту и прилагаются на отдельном листе. Значения задаются по контрольному материалу CRM 470.

### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с местными требованиями.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Johnson, A.M.: A new international preparation for proteins in human serum, Arch. Pathol. Lab. Med. 117 (1993) 29-31.

Дата выхода: 01. 2008

### MANUFACTURER

**PZ CORMAY S.A.**  
ul. Wiosenna 22,  
05-092 Łomianki, POLAND  
tel.: +48 (0) 22 751 79 10  
fax: +48 (0) 22 751 79 14  
<http://www.pzcormay.pl>

01/08/10/09