

CORMAY HbA_{1c} DIRECT CALIBRATORS

КАЛИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА A_{1c}



Наименование Объем Кат. №
CORMAY HbA_{1c} DIRECT CALIBRATORS 4 x 0,5 мл 4-308

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с локальными требованиями.

ВВЕДЕНИЕ

Определение HbA_{1c} – самое распространенное исследование в оценке контроля гликемии при диабете. Величина HbA_{1c} предоставляет информацию об уровне глюкозы за 4-8 недель, предшествовавших исследованию.

Набор CORMAY HbA_{1c} DIRECT CALIBRATORS предназначен для построения калибровочной кривой при определении гемоглобина HbA_{1c} прямым методом.

Дата создания: 09. 2012.

СОСТАВ НАБОРА

	Объем
HbA _{1c} DIRECT CALIBRATOR 1	1 x 0,5 мл
HbA _{1c} DIRECT CALIBRATOR 2	1 x 0,5 мл
HbA _{1c} DIRECT CALIBRATOR 3	1 x 0,5 мл
HbA _{1c} DIRECT CALIBRATOR 4	1 x 0,5 мл

РАСТВОРЕНИЕ

Очень аккуратно снимите крышку с флакона и добавьте точно 0,5 мл деионизованной воды. Закройте крышку, осторожно перемешивайте в течение 10 минут до полного растворения материала.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

- При температуре 2-18°C калибраторы сохраняют стабильность в течение всего срока годности, указанного на упаковке. Защищать от света и перегрева!
- Растворенный калибратор стабилен до 4 недель при 2-8°C или до 8 недель при -20°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

- Продукт только для диагностики in vitro.
- Калибраторы должны использоваться только по назначению, квалифицированным лабораторным персоналом, в соответствующих лабораторных условиях.
- Калибраторы содержат продукты человеческого происхождения, которые были протестированы на наличие антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антитела к ВИЧ и гепатиту С (HCV), и оказались неактивными. Тем не менее, с ними необходимо обращаться как с потенциально биологически опасным материалом с соблюдением необходимых мер предосторожности.
- Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.
- Перед исследованием HbA_{1c} DIRECT растворенный калибратор должен быть обработан HEMOLYSING REAGENT в соответствии с инструкцией к набору HbA_{1c} DIRECT.

ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Значения согласно NGSP [%]:

CORMAY HbA _{1c} DIRECT CALIBRATORS		Серия: 205-01
КАЛИБРАТОР	Значения калибратора для ACCENT-200, Prestige 24i	Значения калибратора для определений полученных на других анализаторах
1	5,8 %	5,5 %
2	9,4 %	9,0 %
3	13,0 %	12,7 %
4	14,8 %	14,6 %

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

В качестве эталонного материала при производстве калибраторов HbA_{1c} был использован изготовленный по стандартам IFCC калибратор Tosoh .

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

PZ CORMAY S.A.
Ул. Весэнна 22,
05-092 Ломянки, ПОЛЬША
тел.: +48 (0) 22 751 79 10
Факс: +48 (0) 22 751 79 14
<http://www.cormay.pl>