 DAC-SpectroMed s.r.l. МД-2012, Молдова, г. Кишинев, ул. Армянская, 47, кв. 64 Тел.: +37322/ 574900, 574922/23; факс: +37322/ 574920 Email: office@dacspectromed.com www.dacspectromed.com	Anti-Syphilis-S-Cart-DAC Код 4191AS1 1 тест	PT MD 11-15796482-005:2006 Только для диагностики «in vitro» Хранить при 2-30°C
Тест-картридж для выявления антител всех изотипов (IgG, IgM, IgA) к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке крови с целью диагностики сифилиса		

ВВЕДЕНИЕ

Anti-Syphilis-S-Cart-DAC представляет собой экспресс-тест прямого связывания, предназначенный для качественного обнаружения антител к сифилису при диагностике сифилиса. Результаты тестирования считываются визуально без использования прибора.

Тест основан на принципе сэндвичевого иммуноанализа с двойным протеин-антигеном в сыворотке. Очищенные рекомбинантные протеин-антигены сифилиса используются для специфической идентификации антител к сифилису. Данный одноэтапный тест очень чувствительный и занимает по времени 10-20 минут.

Достоверность в диапазоне от 95 до 100%

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Индивидуально упакованный тест-картридж с влагопоглотителем и пластиковой пипеткой.
2. Инструкция

СБОР ПРОБ


Для получения сыворотки следует собрать кровь в контейнер без антикоагулянта. Оставить кровь свернуться и отделить сыворотку из сгустка. Для тестирования использовать сыворотку.

Если пробу невозможно тестировать в тот же день, сыворотку следует хранить в холодильнике или морозилке. Перед тестированием пробы следует довести до комнатной температуры.

Повторное замораживание недопустимо.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Перед началом тестирования откройте упаковку, надорвав по отметке. Извлеките тест из упаковки и установите на ровную чистую поверхность.
2. Наберите 0,100 мл (около 3 капель) образца в пипетку, и добавьте их в лунку для образца на картридже.
3. Инкубируйте 15 минут и считайте результат. Не считывайте результат спустя 20 минут.

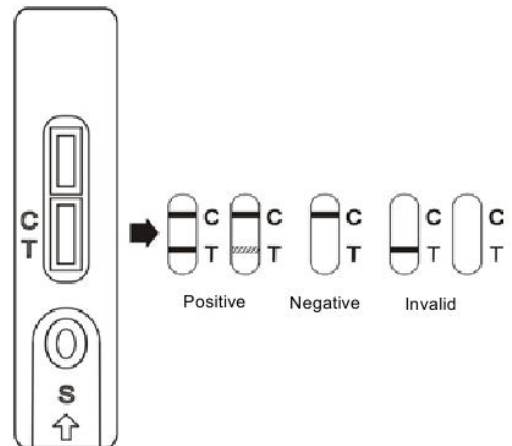

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

- **Negative (отрицательный):** появляется только цветная полоса на контрольном участке. На тестовом участке видимая полоса отсутствует.
- **Positive (положительный):** в дополнение к контрольной цветной полосе на тестовом участке появляется четкая цветная полоса.
- **Invalid (недействительный):** полное отсутствие окрашивания как на контрольном, так и на тестовом участках является индикатором ошибки в процедуре тестирования и/или порчи реагента.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Тест-наборы можно хранить при температуре 2-30°C в запечатанной упаковке до истечения срока годности. Тест-наборы следует оберегать от прямых солнечных лучей, влажности и тепла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Только для диагностики *in vitro*.
2. Не использовать набор после истечения срока годности.
3. Тест-устройство не использовать повторно.