

CORMAY СК-МВ CALIBRATOR

КАЛИБРАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ СК-МВ



Название	Объём	Номер кат.
CORMAY СК-МВ CALIBRATOR	1 x 1 мл	5-182

CORMAY СК-МВ CALIBRATOR используется для калибровки наборов Liquick Cor-СК-МВ mini (Ном. кат. 1-295), Liquick Cor-СК-МВ 30 (Ном. кат. 1-227), PRESTIGE 24i LQ СК-МВ (Ном. кат. 4-227, 4-427), HC-СК-МВ (Ном. кат. 4-527), ACCENT-300 СК-МВ (Ном. кат. 7-327), ACCENT-200 СК-МВ (Ном. кат. 7-227), A-400 СК-МВ (Cat No 7-427).

Значение активности СК-МВ отпечатано на этикетке каждого флакона.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очень осторожно открыть флакон, добавить в него **1 мл** дистиллированной/деионизованной воды и оставить на **30 минут**. Несколько раз осторожно размешать для полного растворения лиофилизата. Избегать образования пены.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

1. Лиофилизованные сыворотки остаются стабильными при 2-8°C до истечения срока, указанного на упаковке.
2. Стабильность компонентов растворенного калибратора:

Темп. 25°C	8 часов
Темп. 4°C	5 дней
Темп. -20°C	4 недели

(при однократной заморозке)
3. Храните калибратор плотно закрытым, если не используете.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Продукт только для диагностики in vitro.
2. Калибратор может быть использован только по назначению, квалифицированным лабораторным персоналом, при соответствующих лабораторных условиях.
3. Калибратор протестирован на присутствие вируса гепатита Б и гепатита Ц и антитела анти-ВИЧ и оказался нереактивным. Однако, с этим материалом следует обращаться как с потенциально инфицированным.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Поступать согласно местным требованиям.

Дата издания: 07. 2009.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

PZ CORMAY S.A.
ul. Wiosenna 22,
05-092 Łomianki, POLAND
tel.: +48 (0) 22 751 79 10
fax: +48 (0) 22 751 79 14
<http://www.pzcormay.pl>

07/09/07/09

