

НАБОР КАЛИБРАТОРОВ ГОМОЦИСТЕИНА

Жидкая калибровочная сыворотка 3 уровня

909563, Homocysteine Calibrator Set

Каталог. № : **909563, 909563SV**
Производитель: **Dialab, (Австрия)**

Методика от **07-2010**
Версия **01**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Состав:

909563 3 x 1 мл 3-уровневый калибровочный набор
909563SV 3 x 1 мл 3-уровневый калибровочный набор

Дополнительно предлагаются:

908510 4x20 мл (78мл) Набор реагентов Гомоцистеина
908520 4x10 мл (39мл) Набор реагентов Гомоцистеина

Калибровочная сыворотка на основе человеческой для количественного in-Vitro определения гомоцистеина в сыворотке или плазме человека с использованием фотометрических систем

СОСТАВ КАЛИБРАТОРА

Калибраторы приготовлены на основе сыворотки человека.

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЯ

Калибраторы готовы к использованию.

Аккуратно покрутить перед каждым использованием.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КАЛИБРАТОРА

Хранение: При температуре 2-8 °C

Стабильность: До окончания срока годности

ЗАКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ХРАНИТЬ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Материалы человеческого происхождения были протестированы при помощи тестов, установленных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (США) и найдены отрицательными к ВИЧ1, ВИЧ2, вирусу Гепатита В и Гепатита С.
2. Обращаться со всеми материалами и образцами пациентов как с потенциально инфекционными, используя безопасные лабораторные процедуры.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению отходов.

ДАнные АНАЛИЗА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПАРТИИ

Уровень	Партия	Заданное значение (мкмоль/л)
Уровень 1	HTS10112A-02-01	0.00
Уровень 2	HTS20112A-02-01	9.20
Уровень 3	HTS30112A-02-01	33.50



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Черновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com