

НАБОР СТАНДАРТОВ НАТРИЯ

Жидкие Стандарты 2 уровня

909680, 909680SV, Sodium Standard Set

Каталог. № : **909680, 909680SV** Методика от **16-04-2009**
Производитель: **Dialab, (Австрия)** Версия **01**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Черновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

Стандарты для использования в тестах для количественного in-Vitro определения Натрия в сыворотке с использованием фотометрических систем

Кат. №	Состав:		
909680	2 x 3 мл	1 x 3 мл L1 1 x 3 мл L2	Полный набор
909680SV	2 x 3 мл	1 x 3 мл L1 1 x 3 мл L2	Подписанные пробирки

СОСТАВ

Водный буферный раствор с химикатами и консервантами уровня реагента.

ПОДГОТОВКА СТАНДАРТА

Стандарты находятся в жидком состоянии и готовы к использованию.

Аккуратно покрутить перед каждым использованием.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ СТАНДАРТА

Хранение: При температуре 2-8 °C

Стабильность: До окончания срока годности

ЗАКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не использовать стандарты при видимом наличии загрязнения в пробирке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Продукт предназначен только для использования in-Vitro.
2. Следовать установленным мерам предосторожности при работе с лабораторными реагентами.
3. Ложные результаты могут быть получены при ненадлежащем хранении или несоблюдении процедуры обращения с образцом и его тестирования.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Соблюдать местные требования по уничтожению отходов.

ДАнные АНАЛИЗА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛя ПАРТИИ

Партия: LNS001120-01-01		Срок годности: 2015 04
Уровень	Партия	Заданное значение (ммоль/л)
Уровень 1	LNS101120-01-01	111.9
Уровень 2	LNS201120-01-01	168.2

Значения и срок годности характерны для каждой отдельной партии.