

СТАНДАРТЫ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕСТАХ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЛИЯ В СЫВОРОТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Жидкие Стандарты 2 уровня

910180, 910180SV, Potassium Standard Set

Каталог. № : **910180, 910180SV** Методика от 22-02-2010
Производитель: **Dialab, (Австрия)** Версия 01



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Кат. №	Состав:		
910180	2 x 3 мл	1 x 3 мл L1 1 x 3 мл L2	Полный набор
910180SV	2 x 3 мл	1 x 3 мл L1 1 x 3 мл L2	Подписанные пробирки

СОСТАВ

Водный буферный раствор с химикатами и консервантами уровня реагента.

ПОДГОТОВКА СТАНДАРТА

Стандарты находятся в жидком состоянии и готовы к использованию.

Аккуратно покрутить перед каждым использованием.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ СТАНДАРТА

Хранение: При температуре 2-8 °C

Стабильность: До окончания срока годности

ЗАКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не использовать стандарты при видимом наличии загрязнения в пробирке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Продукт предназначен только для использования in-Vitro.
2. Следовать установленным мерам предосторожности при работе с лабораторными реагентами.
3. Ложные результаты могут быть получены при ненадлежащем хранении или несоблюдении процедуры обращения с образцом и его тестирования.
4. Содержит азид натрия, который может реагировать со свинцом или медью и формировать взрывоопасные вещества. Смыть в канализацию с большим количеством воды при утилизации данного реагента. Не глотать! Избегать контакта с кожей, глазами и слизистыми оболочками.

ДАнные АНАЛИЗА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПАРТИИ

Партия: LKS001130-01-01		Срок годности: 2014 07
Уровень	Партия	Заданное значение (ммоль/л)
Уровень 1	LKS101130-01-01	3.00
Уровень 2	LKS201130-01-01	7.00

Значения и срок годности характерны для каждой отдельной партии.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Черновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com