

НАБОР КОНТРОЛЕЙ КАЛИЯ



Лифофилизиованная контрольная сыворотка 2 уровня

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

910190, Potassium Control Set

Каталог. № : **910190**
Производитель: **Dialab, (Австрия)**

Методика от **22-02-2010**
Версия **01**

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Черновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Сыворотка на основе человеческой для качественного контроля количественного определения Калия в сыворотке человека с использованием фотометрических систем

Кат. № **Состав:**
910190 **2 x 3 мл** Набор контролей, 2 уровня

Дополнительно предлагаются:
910110 5 x 10 мл Набор реагентов Калия

СОСТАВ КОНТРОЛЯ

Контроли состоят из Калия в сыворотке человека.

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЯ

Развести содержимое каждой пробирки с 3.0 мл дистиллированной воды; оставить при комнатной температуре на 20 минут, осторожно перемешивая.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Лифофилизиованный:	Температура: 2-8 °С	Стабильность: До окончания срока годности
После восстановления:	2-8 °С	2 недели

ЗАКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХРАНИТЬ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы человеческого происхождения были тестированы при помощи тестов, установленных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (США) и найдены отрицательными к ВИЧ1, ВИЧ2, вирусу Гепатита В и Гепатита С.
Обращаться со всеми материалами и образцами пациентов как с потенциально инфекционными, используя безопасные лабораторные процедуры.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению отходов.

ДАННЫЕ АНАЛИЗА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПАРТИИ

Партия: ЛКС001140 Срок годности: 2015/09			
Уровень	Партия	Заданное значение (ммоль/л)	Диапазон (ммоль/л)
Уровень 1	ЛКС101140	3.80	3.23 – 4.37
Уровень 2	ЛКС201140	5.70	4.84 – 6.56