

КОНТРОЛЬ МИКРОАЛЬБУМИНА

A00808, A00809, MICROALBUMIN CONTROL

Каталог. № : A00808; A00809
Производитель: Dialab, (Австрия)

Методика от 11-2012
Версия 02



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул. Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Жидкий человеческий контроль для использования в иммунотурбидиметрических анализах при определении микроальбумина

Ссылка	Содержимое
A00808	1 x 1 мл Контроль микроальбумина
A00809	1 x 5 мл Контроль микроальбумина

СОСТАВ

Контроль микроальбумина Диалаб основан на человеческой плазме.
Консервант: 0,095 % азид натрия.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Контроль микроальбумина жидкий, готовый к использованию.
2. Используйте этот контроль в тот же способ как требуется по отношению к реагенту и/или аппарату.
3. Позвольте контролю достичь комнатной температуры (при 22 – 28°C) перед использованием.
4. Контроль не должен оставаться в течении длительных периодов времени (до 6 часов) при комнатной температуре. Держите неиспользуемые флаконы все время плотно закрытыми, чтобы избежать микробиологического загрязнения. Неиспользуемые флаконы храните в холодильнике.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Хранение:	при 2 – 8 °C
Стабильность:	до окончания срока годности
Стабильность после вскрытия	до 6 недель при 2 – 8 °C

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ДАнные ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРТИИ НАБОРА

Концентрации прослеживаются до CRM 470.
Значения и срок годности зависят от ПАРТИИ набора.
См. данные согласно определенной партии в оригинале инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Каждая отдельная порция донорской крови, использованная для изготовления белкового контроля оказалась нереактивной во время проверки утвержденными методами на HbsAg, анти-ВИЧ, и анти-ВИЧ 1+2. Поскольку нет возможности окончательно исключить передачу продуктами человеческой крови носителей инфекций, рекомендуется обращаться с этим материалом и всеми образцами пациентов как со способными передавать инфекционные болезни.

ПРИПИСАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Номер партии: MAC027 Срок годности: 2017/07

	Среднее (мг/л)	Диапазон (мг/л)
Микроальбумин	215	183 - 247

Концентрации прослеживаются до ERM-DA470