

Инструкция по применению панели сывороток ПВОК, содержащих и не содержащих антитела к ВГС «Панель сывороток ПВОК – анти-ВГС»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Панель сывороток ПВОК (*Программа Внешней Оценки Качества*) предназначена для внешнего контроля качества иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Инструкция устанавливает порядок и условия применения панели сывороток, содержащих и не содержащих антитела к ВГС.
- 2.2. Каждый образец панели представляет собой лиофильно высушенную инактивированную сыворотку крови, полученную от больного гепатитом С или здорового донора.
- 2.3. Сыворотки аттестованы в иммуноферментных наборах отечественных и зарубежных производителей.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При постановке иммуноферментного анализа следует соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с потенциально инфекционным материалом:

- Работать в резиновых перчатках и респираторе;
- Для предотвращения выброса материала при разгерметизации флаконов пробку следует сначала слегка приоткрыть, а лишь затем извлечь полностью;
- Не пипетировать ртом;
- Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями СП 1.2.731-99 и МУ-287-113.

4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- образцы сывороток крови, содержащие и не содержащие антитела к ВГС – **16 флаконов**; на каждом флаконе указан шифр образца;
- инструкция по применению.

Дополнительно прилагается пакет документов: обращение к участнику, схема проведения ПВОК, бланки протоколов (*10 штук*), тестовое задание ПВОК.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 5.1. Панель сывороток ПВОК хранить и транспортировать при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности – **5 лет** со дня выпуска.
- 5.2. Восстановленные образцы хранить **не более 14 суток** при температуре (2-8)°С, или **в течение 2 месяцев** при температуре минус (20-40)°С. Допускается трёхкратное замораживание и оттаивание восстановленных сывороток.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 6.1. После вскрытия коробки флаконы с образцами проверить на целостность и наличие этикеток. При обнаружении повреждения флакон следует уничтожить.
- 6.2. В каждый флакон с лиофильно высушенным образцом сыворотки внести по **1,0 мл дистиллированной воды**. Содержимое флакона тщательно перемешать до полного растворения осадка, выдержать при комнатной температуре 15 минут, после чего вновь тщательно перемешать.
- 6.3. Выявление антител к ВГС в образцах панели сывороток проводить в тех же условиях, что и обычные исследования сывороток в Вашей лаборатории, согласно инструкции по применению набора реагентов.
- 6.4. Учёт результатов по образцам панели следует проводить в соответствии с инструкцией по применению используемого набора реагентов.
- 6.5. Результаты исследования образцов контрольной панели внести в прилагаемые бланки протоколов.

7. АДРЕСА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

630128, Новосибирск 128, а/я 102,
ЗАО «Вектор-Бест», отд. ИФА гепатита С;
тел.: (383) 332 94 39;
тел./факс: (383) 332 94 44;
e-mail: pvok@vector-best.ru

10.11.10