

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ СЫВОРОТКА - ПАТОЛОГИЯ

D98482, DIACON P

Каталог. № : **D98482**
Производитель: **Dialab, (Австрия)**

Методика от **24-10-2006**
Версия **01**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

рекомендуется обращаться с Контролем, соблюдая те же предосторожности, что и при обращении с образцами пациентов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Ссылайтесь на Ваши местные требования законодательства.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Черновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

Лиофилизированная универсальная контрольная сыворотка для использования в анализах для количественного определения *in vitro* различных аналитов на фотометрических системах

Кат.№	Содержимое	
D98482	12 x 5 мл	Полный набор
D98482SV	1 x 5 мл	Флаконы с этикетками
D98482VSV	1 x 5 мл	Флаконы без этикеток (OEM)

СОСТАВ

Компоненты:

Объединенная человеческая сыворотка
Очищенные компоненты человеческого и животного происхождения
Очищенные медицинские препараты
Неорганические компоненты
Стабилизаторы

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЯ

1. Лиофилизат закрыт в вакуумной упаковке. Поэтому флакон следует открывать очень осторожно, чтобы избежать потери высушенного материала.
2. Добавьте ровно 5 мл дистиллированной воды (недостаточное перерастворение контроля и ошибка в методике анализа могут причинить ошибочные результаты).
3. Осторожно закройте флакон и оставьте контроль на 30 мин.
4. Осторожно вращая, чтобы избежать пенообразования, полностью растворите содержимое. Не встряхивать!

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Хранение: при 2 – 8 °С
Стабильность: до окончания срока годности

Стабильность после перерастворения:

	20-25 °С	2-8 °С	-20 °С
Билирубин (в темноте)	-	2 дня	14 дней
GPT	2 часа	7 дней	30 дней
GOT	2 часа	7 дней	30 дней
СК-НАС, СК-МВ	4 часа	7 дней	30 дней
Другие аналиты	8 часов	7 дней	30 дней

НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Не использовать изделие при явной видимости микробиологического роста во флаконе.
Неправильное обращение и/или хранение контроля могут повлиять на результаты.
ЗАМОРАЖИВАТЬ ТОЛЬКО РАЗ!

ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРТИИ НАБОРА АНАЛИЗА

Значения и срок годности зависят от партии изделия.
Просьба, см. таблицу с данными определенной партии изделия.

ЗНАЧЕНИЯ И ДИАПАЗОНЫ АНАЛИЗА

Значения и диапазоны анализа для каждого перечисленного аналита взяты от использования реагентов Dialab или реагентов от других производителей.

Рекомендуется, чтобы каждая лаборатория устанавливала свое собственное среднее значение для этого контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Каждая отдельная порция донорской крови, использованная для изготовления контроля DIACON P оказалась неактивной во время проверки утвержденными методами на HbsAg, анти-ВИЧ, и анти-ВИЧ 1+2. Поскольку нет возможности окончательно исключить передачу продуктами человеческой крови носителей инфекций,