

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ СЫВОРОТКА

D98485, DIACAL AUTO

Каталог. № : **D98485**
Производитель: **Dialab, (Австрия)**

Методика от **17-06-2008**
Версия **02**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Лиофилизированная универсальная калибровочная сыворотка для использования в анализах для количественного определения in vitro различных аналитов на фотометрических системах

Ссылка	Содержимое	
D98485	5 x 3 мл	Полный набор
D98485SV	1 x 3 мл	Один флакон
D98485VSV	1 x 3 мл	Один флакон без этикетки (ОЕМ)

СОСТАВ

Объединенная человеческая сыворотка
Очищенные добавки человеческого и животного происхождения
Очищенные медпрепараты
Химические добавки
Бактериостатические носители

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОБАВОК

Аналит	Происхождение
Щелочная фосфатаза	Человек
ALAT / GPT	Свинья (сердце)
Альфа-амилаза	Свинья (поджелуд. железа) / чел.
Панкреатическая амилаза	Свинья (поджелуд. железа)
ASAT/GOT	Свинья (сердце)
Желчные кислоты	Свинья
Билирубин	Свинья (желчь)
Билирубин прямой	Химическое
Кальций	Химическое
Хлорид	Химическое
Креатинкиназа	Свинья (мышца) / человек
Креатинкиназа-MB	Человек
Медь	Химическое
Креатинин	Химическое
Гамма-GT	Свинья (почка)
GLDH	Бык
Глюкоза	Химическое
Железо	Химическое
Лактат	Химическое
LDH	Цыпленок (сердце)
Липаза	Свинья
Магний	Свинья
Форсфат	Свинья
Триглицерид	Свинья
Мочевина	Свинья
Мочевая кислота	Свинья
Цинк	Свинья

ПОДГОТОВКА КАЛИБРАТОРА

1. Очень осторожно откройте флакон, избегая любой потери лиофилизированного материала.
2. Добавьте ровно 3 мл дистиллированной воды (недостаточное перерастворение контроля и ошибка в методике анализа может причинить ошибочные результаты).
3. Осторожно закройте флакон и оставьте на 30 мин.
4. Осторожно вращая, чтобы избежать пенообразования, полностью растворите содержимое. Не встряхивать!

Оставьте замороженные аликвоты Dialcal Auto в темноте при комнатной температуре (20-25 °C) до их полного размораживания. После размораживания проведите осторожное вращение для полной гомогенизации и используйте непосредственно для калибровки.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КАЛИБРАТОРА

Хранение:	при 2 – 8 °C
Стабильность:	до окончания срока годности

Стабильность после перерастворения:

	25 °C	4 °C	-20 °C
Билирубин (в темноте)	4 часа	8 часов	14 дней
Кислая фосфатаза	2 часа	2 дня	30 дней
Другие аналиты	8 часов	2 дня	30 дней

НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Не использовать изделие при явной видимости микробиологического роста во флаконе. Неправильное обращение и/или хранение контроля может повлиять на результаты.

ЗАМОРАЖИВАТЬ ТОЛЬКО РАЗ!

ДАнные ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРТИИ НАБОРА АНАЛИЗА

Концентрации аналитов калибратора зависят от партии и предоставляются в листе значений соответствующей партии. Определения проводились согласно стандартизованных протоколов с использованием реагентов Dialab и исходного калибратора Dialcal Auto или референтных материалов. Лист значений содержит информацию о единстве измерений. Просьба, см. таблицу с данными определенной партии набора анализа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Каждая отдельная порция донорской крови, использованная для изготовления DIACAL AUTO оказалась нереактивной во время проверки утвержденными методами на HbsAg, анти-ВИЧ, и анти-ВИЧ 1+2.

Добавки животного происхождения получены от источников, сертифицированных нормой ЕС 1774/2002. Все животные доноры происходят из территории, где отсутствуют губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, бруцеллез, чума, болезни ног и ротовой полости, свиной респираторный и репродуктивный синдром, свиная лихорадка, свиная пузырчатка, переносимый гастроэнтерит.

Поскольку нет возможности окончательно исключить передачу продуктами человеческой крови и компонентами животных носителей инфекций, рекомендуется обращаться с калибратором, соблюдая те же предосторожности, что и при обращении с образцами пациентов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Ссылайтесь на Ваши местные требования законодательства.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com