

# ПРОМЫВОЧНЫЙ РУТИННЫЙ РАСТВОР

## ORG 305, Flush Routine Solution

Каталог. № : **ORG 305**  
Количество : **96**  
Производитель: **Orgentec (Германия)**

Методика от **05-2012**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

### НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Промывочный Рутинный Раствор предназначен для очистки медицинских устройств Alegria®. Предназначен только для профессионального использования в лабораториях.

### СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭТИКЕТКАХ

	Производитель
	Номер по Каталогу
	Количество
	Код Партии
	Используйте до
	Температурные Ограничения
	Воспользуйтесь Инструкцией

### ПРИНЦИП

Промывочный Раствор предназначен для использования для очистки игл на приборе Alegria® и промывочной системы в месячном цикле промывки.

В первом промывочном цикле используется разбавленный Промывочный Раствор: система и позиции промываются каждая с 5 минутами инкубации. Эта процедура проводится для обеих систем: иглы и пробирки.

Затем во втором цикле промывки используется дистиллированная вода для удаления избыточного Промывочного раствора. На этом этапе инкубации не требуется.

Ознакомьтесь с инструкцией по работе с инструментом Alegria®.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Избегать контакта с кожей. Использовать одноразовые перчатки. В случае контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством чистой, проточной воды в течение не менее 10 минут. Обратитесь к врачу, если неприятные ощущения не проходят. Снять загрязненную одежду и обувь и выстирать ее перед использованием.
- Избегайте контакта с глазами. Носить защитные очки. После контакта с глазами тщательно промойте открытые глаза проточной водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь к врачу.
- Избегайте вдыхания. В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух.
- Не есть, не пить, не курить, не наносить макияж в местах, где используется Промывочный Раствор.
- Не глотать. При попадании внутрь прополоскать рот водой, выплюнуть. При проглатывании выпить стакан воды медленно. Не вызывать рвоту. При рвоте держать голову пострадавшего наклоненной в лежачем положении, чтобы предотвратить аспирацию. Обратитесь к врачу
- Для утилизации лабораторных отходов национальное или региональное законодательство должно соблюдаться.

### СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА

- **ORG 305-01** Достаточно для 1 применения
- **ORG 305-12** Достаточно для 12 применений
- **20 мл** Промывочный раствор; синий; водный раствор гидроксида натрия < 0.5% моющего средства и < 0.5% детергента. 100x концентрат.
- **1** Инструкция по применению: Alegria® Mini-CD

### ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- Хранить Раствор при 10-30 °С.
- Невскрытый реагент Промывочного Раствора стабилен до окончания срока годности, указанного на этикетке.
- Не используйте Промывочный Раствор после окончания срока годности.

### ТРЕБУЕМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Мерный цилиндр на 2000 мл.
- Дистиллированная или деионизированная вода

### ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТА

Развести концентрат Промывочного Раствора (20 мл) дистиллированной или деионизированной водой до конечного объема 2000 мл перед использованием.

### ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ

- **Подготовьте инструмент Alegria®**  
Программное обеспечение Alegria® предлагает специальные настройки для **Месячной рутинной промывки системы**: нажмите кнопку "Настройки" и нажмите кнопку "Сервис" на дисплее.
- **Подготовьте контейнеры с реагентами Alegria**  
Поместить 1000 мл свежее приготовленного разбавленного Раствора для промывки в контейнер гидравлической системы. Поместить 500 мл свежее приготовленного разбавленного Раствора для промывки в каждый из контейнеров для Промывочного буфера.
- **Первый цикл промывки: Промывка системы**  
Следуйте инструкциям на экране: 5 минут инкубации для каждого шага.
- **Второй цикл промывки: Промывка деионизированной водой**  
Освободить все три контейнера Alegria с реагентами и тщательно промыть их с деионизированной водой. Поместить 1000 мл деионизированной воды в контейнер гидравлической системы. Поместить 500 мл деионизированной воды в каждый из контейнеров промывочного буфера. Следуйте инструкциям на дисплее: инкубации не требуется.

### Важные замечания

- После окончания промывки избавиться от всех неиспользованных растворов из контейнеров с реагентами Alegria! Заменить на свежую Гидравлическую систему и Промывочный буфер.
- Один раз в неделю тщательно очищать все контейнеры с реагентами Alegria с помощью щетки и имеющимся в продаже лабораторным моющим средством.
- После очистки реагентов контейнеры тщательно промыть деионизированной водой.



### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»  
ул. Чорновола, 97  
г. Ивано-Франковск, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)