

КАЛІБРАТОР СРБ ВИСОКЕ, ЗНАЧЕННЯ

CRP Calibrator High

Каталог. №: **A00538**

Дата випуску інструкції: **2012/11**
Версія **02**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідкий калібратор людського походження, призначений для використання в якості калібратора в імунотурбідиметричних аналізах СРБ

Кат. №	Вміст	
A00538	1x 1 мл	Калібратор СРБ Високий
A00710	1x 5 мл	Калібратор СРБ Високий

Склад

Калібратор СРБ Високий Діалаб базується на людській плазмі і плевральній рідині, що містять високі рівні СРБ, в буферизованому фосфатом фізіологічному розчині.

Консервант: 0.095 % азид натрію.

ПІДГОТОВКА

Калібратор СРБ рідкий і готовий до використання.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігання: при температурі 2-8 °С
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відкриття: 6 тижнів при 2-8 °С
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте цей Калібратор таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу.
- Дозвольте Калібратору досягнути кімнатної температури (22-28 °С) перед використанням.
- Калібратор не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте невикористовувані флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробіологічного забруднення. Невикористані флакони зберігайте в холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

- Для використання в in vitro діагностиці.
- Кожна окрема порція крові використана для виготовлення білкового калібратора виявилася нереактивною під час перевірки затвердженими FDA методами на HbsAg, анти-HCV, анти-VІІ, і анти-VІІ 1 + 2. Оскільки тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу VІІ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, ніби вони здатні передавати інфекційні хвороби.
- З реагентами, які містять азид натрію поводитись з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

ДАНИ КОНКРЕТНОЇ ПАРТІЇ НАБОРУ

Значення і термін придатності є дуже специфічними.

Лот: 04893		Термін придатності: 2023-07-31	
Параметр		Призначене значення	
СРБ		14,08 мг/дл	
Значення прослідковуються до BCR-ERM- DA474/IFCC.			



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

