

РЕАГЕНТ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ Dia-REF

Dia-REF

Кат. №: 11500000

Дата випуску інструкції: 01-02-2011
Версія 2



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: 11500000

500 мл

НАЗВА ПРОДУКТУ

Реагент для промивання Dia-REF

ПРИЗНАЧЕННЯ

(Тільки для використання в In Vitro діагностиці)

Для використання інструментів з серії ACL Коагулометра (100-7000) для регулювання та промивання інструментів.

КОРОТКИЙ ОПИС І ПРИНЦИП

Обладнання ACL визначає кінцеву точку процесу згортання нефелометричним методом. Обладнання потребує емульсії для регулювання калібрування та для промивання контуру рідини між робочими етапами.

За будь-якою іншою інформацією щодо вимірювання див. відповідний посібник з експлуатації обладнання.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Силіконова емульсія	< 1.0 %
Хлорид натрію	< 0.9 %
Азид натрію	< 0.01 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Цей продукт готовий до використання.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці.
- Всі реагенти, відходи та утилізоване одноразове лабораторне обладнання слід розглядати як небезпечні відходи. Їх обробка та утилізація повинні здійснюватися відповідно до чинних правил обробки небезпечних матеріалів.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт призначений для освіченого лабораторного персоналу. Продукт повинен бути кімнатної температури перед використанням (24 год). Відкрийте пляшку та підключіть до неї аспіраційну трубку, та зафіксуйте стопор знову.

Підготовка всіх реагентів та одноразових матеріалів для вимірювань відповідно до інструкції.

Не змішуйте цю емульсію з продуктами інших виробників! Це може призвести до помилкового результату!

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент є стабільним до закінчення терміну придатності вказаного на етикетці, за умови зберігання між 15-30°C. Якщо реагент показує будь-яку помітну мутність, зміну кольору і тощо, його потрібно замінити!

Не використовуйте продукт після заморожування!

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Це використання разом з реагентами відповідно до інструкції призводить до правильних результатів тесту.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент повинен використовуватися в діапазоні температури навколишнього середовища 15- 35°C. Використання реагенту не замінює належну роботу та обслуговування приладу.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

Щодо наявності нижчезазначених реагентів зверніться до місцевого дистриб'ютора.

- Протромбіновий час (Dia-PT; Кат. №: 81100, 81050)
- Активованій частковий тромбопластиновий час (Dia-PTT; Ка. №: 71048)
- Фібриноген (Dia-FIB; Кат. №: 61060)
- Тромбіновий час тест (Dia-TT; Кат. №: 51036)
- IL реагент



ВИРОБНИК

ДІАГОН ЛТД.
вул. Барош, 48-52,
H-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 1 3696500
Факс: +36 1 3696301
Web: www.digon.com
e-mail: digon@digon.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

