

# РОЗЧИН ІМІДАЗОЛУ Dia-IMIDAZOL

## Dia-IMIDAZOL

Кат. №: 21180

Дата випуску інструкції: 10-05-2018

Версія: 5



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: 21180

12 x 15 мл

### НАЗВА ПРОДУКТУ

Буфер для розведення Dia-IMIDAZOL.

### ПРИЗНАЧЕННЯ


(Тільки для використання в In Vitro діагностиці)

Dia-IMIDAZOL - це буфер, призначений для розведення контролю, калібратора та зразків людини при проведенні лабораторних досліджень, скринінгових тестів на визначення протромбінового часу (PT), фібриногену (FIB) чи спеціального тесту на Д-димер (Ddi), факторів.

### АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Dia-IMIDAZOL – це буферний розчин з консервантом.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Символ небезпеки, категорія, небезпека та запобіжні застереження в останньому регламенті CLP:
  -  Репродуктивний токсикант, категорія 1B
  - H360: Може вплинути на фертильність або ненароджену дитину (специфічний для стану вплив, якщо він відомий) (шляхи впливу на стан, якщо остаточно доведено, що жоден інший шлях впливу не викликає небезпеки).
  - P201: Отримайте спеціальні вказівки перед використанням.
  - P202: Не розпочинайте роботу, доки всі запобіжні заходи не будуть прочитані та зрозумілі.
  - P281: Застосовуйте індивідуальний захисний засіб у міру необхідності.
  - P308+P313: Якщо відбувся контакт: Зверніться за медичною допомогою.
  - P405: Зберігати закритим.
  - P501: Утилізувати вміст/контейнер (відповідно до пункту 13).
- Людина, що проводить дослідження з використанням Dia-IMIDAZOL, повинна бути кваліфікованим лабораторним фахівцем!
- Реагент, що вступає в контакт із зразками та іншими матеріалами, повинен оброблятися так, наче він може передавати інфекцію, і повинен бути утилізований з дотриманням належних запобіжних заходів!
- Уникайте мікробного забруднення контролю, тому що це може призвести до отримання помилкових результатів!
- Реагенти, відходи та утилізоване одноразове лабораторне обладнання повинні розглядатися як небезпечні відходи! Їх обробка та утилізація повинні здійснюватися відповідно до правил обробки небезпечних матеріалів.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці!

### ПІДГОТОВКА

Розчин Dia-IMIDAZOL готовий до використання. Зачекайте, доки реагент не досягне робочої температури!

### ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

Дотримуйтеся інструкції з використання відповідного тесту або калібратора, а також посібника відповідного коагулометра для вимірювання необхідного параметра.

### ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Закритий флакон розчину Dia-IMIDAZOL стабільний при зберіганні при 2-8 °C до дати закінчення терміну придатності, вказаного на флаконі.


Стабільність після відкриття оригінального флакону показана нижче в таблиці:

T (°C)	20-25	2-8
Тижнів	2	8

### НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ З НАБОРОМ

- PT:
  - Dia-PT (кат. №: 81020; 81025; 81050; 81100)
  - Dia-PT LIQUID (кат. №: 82012; 82024; 82048; 82096)
  - Dia-PT R (кат. №: 83025; 83050; 83100)
- FIB: Dia-FIB (Кат. №: 61024; 61060)
- Ddi: Dia-D-DIMER (кат. №: 32075; 32120)
- Калібратор:
  - Dia-CAL (кат. №: 95012)
  - Dia-CAL Spec (кат. №: 09605)
- Різні рівні контролю для контролю якості:
  - Dia-CONT I-II (кат. №: 91010, 91020)
  - Dia-CONT Ddi I-II (кат. №: 93010, 93020)
  - Dia-CONT Spec N (кат. №: 09305)
  - Dia-CONT Spec P (кат. №: 09405)
- Рекомендуються оптичний або механічний аналізатор коагуляції для вимірювання, аналізатори Diacon (Coag Line).

### СИМВОЛИ

	Виробник		Використати до
	Код партії		Каталоговий №
	Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена		Обережно, скло
	Зберігати в сухому місці		Температурна межа
	Застереження		Прочитайте інструкцію щодо використання
	Містить достатньо для <n> тестів		In vitro діагностичний медичний пристрій
	Знак CE		Ця сторона вгору



### ВИРОБНИК

ДІАГОН ЛТД.  
вул. Барош, 48-52,  
H-1097 Будапешт, Угорщина  
Тел.: +36 1 3696500  
Факс: +36 1 3696301  
Web: [www.diacon.com](http://www.diacon.com)  
e-mail: [diacon@diacon.com](mailto:diacon@diacon.com)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

