

КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ASCENT-200

ASCENT-200 ACID WASHING SOLUTION

Кат. №: 3-109

Дата випуску інструкції: 06-2024



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва реагенту	Пакування	Кат. №
ASCENT-200 КИСЛОТНИЙ МИВНИЙ РОЗЧИН	3 x 35 мл (мл)	3-109

ПРИЗНАЧЕННЯ

ASCENT-200 КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН призначений для очищення зондів для реагентів і зразків біохімічних аналізаторів: ASCENT-200 (II GEN)/BS-200, ASCENT-220S/BS-180 і BS-120 під час рутинної роботи аналізатора та для усунення ефекту переносу. Призначений тільки для діагностики *in vitro*, для користування медичними працівниками.

ПРИНЦИП ДІЇ

ASCENT-200 КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН являє собою промивний розчин, розміщений на борту аналізатора. Видалення залишків біологічного матеріалу та реагентів особливо білковмісних матеріалів та мікробних відкладень із зондів для реагентів та зразків відбувається завдяки очисним властивостям реагенту. ASCENT-200 КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить соляну кислоту, що розчиняє та видаляє органічні частинки бруду.

КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ В РЕАГЕНТІ

соляна кислота	278 ммоль/л (mmol/l)
консерванти	

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТУ

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

Реагент, що зберігається на борту аналізатора при 2-10 °C (°C), стабільний протягом 30 днів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Захищати від прямого сонячного світла!
- Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішувати реагент, що залишився, з реагентом з нової упаковки.
- Використовувати засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами та контролями.
- Уникати скидання в каналізацію або в навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до MSDS для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- Продукт відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

ASCENT-200 КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить соляну кислоту.

Небезпека



H314 Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.
H290 Може викликати корозію металів.
P234 Зберігати тільки в оригінальній упаковці.
P280 Одягати захисні рукавички, захисний одяг, засоби захисту очей або обличчя.

R305+R351+R338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжити промивання.

R310 Негайно зателефонувати в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

ASCENT-200 КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН готовий до використання. Використовувати відповідно до інструкції з експлуатації аналізатора та вказівок, що містяться в інструкції: 51_03_24_001_ASCENT-200_CARRYOVER.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ¹

Після використання з реагентами слід поводитися як з потенційно інфекційними та утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

- Залишки реагентів: 18 01 06*
- Порожні упаковки: 15 01 10*
- Стічні води з аналізатора: 18 01 03*

ІНЦИДЕНТИ²

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

- European Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) of 9 April 2018.
- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

Попередня версія: 03	Поточна версія: 04
Оновлено розділи: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ	



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

