

ЗАЛІЗО «BULK»

Liquick Cor-FERRUM "bulk"

Кат. №: 3-292

Дата випуску інструкції: 07-2019



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору

Liquick Cor - FERRUM mini
Liquick Cor - FERRUM 30
Liquick Cor - FERRUM 60
Liquick Cor - FERRUM 500

Номер кат.

3-247
3-257
3-258
3-292

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Діагностичний набір для визначення концентрації заліза, який використовується як для ручного аналізу, так і в кількох автоматичних аналізаторах.

Реактиви повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, відповідним чином кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за цільовим призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ВСТУП

Залізо є найбільш поширеним мікроелементом в організмі. Велика частина заліза в організмі людини знаходиться в межах гем молекули, яка включена в гемоглобін, міоглобін, каталазу, пероксидазу і цитохроми. Залізо зберігається прив'язаним до феритину або гемосидерину і транспортується трансферином. Вимірювання рівня заліза є особливо важливим в діагностиці різних типів анемії.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

Колориметричний метод з феррозином без депротейнізації. Іони заліза (Fe^{3+}), пов'язані в крові з трансферином, вивільнюються в кислому середовищі в присутності детергентів, а потім відновлюються до іонів заліза Fe^{2+} за участю аскорбата. Іони заліза Fe^{2+} реагують з натрієвою сіллю 3-(2-піридил)-5,6-біс(2-[4-фенілсульфо]кислота)-1,2,4-триазина (феррозин), утворюючи забарвлений комплекс. Іони міді Cu^{2+} зв'язуються неосцироїне-НСІ. Інтенсивність забарвлення прямо пропорційна вмісту заліза.

РЕАГЕНТИ

Склад набору

	Liquick Cor-FERRUM mini	Liquick Cor- FERRUM 30
1-ЗАЛІЗО	2 x 25 мл	5 x 25 мл
2-ЗАЛІЗО	1 x 10 мл	1 x 25 мл
3-СТАНДАРТ	1 x 1 мл	1 x 2 мл
	Liquick Cor- FERRUM 60	Liquick Cor- FERRUM 500
1-ЗАЛІЗО	5 x 50 мл	3 x 417 мл
2-ЗАЛІЗО	1 x 50 мл	1 x 250 мл

3-СТАНДАРТ - стандартний розчин іонів заліза - 10 мкмоль/л (56 мкг/дл).

При температурі 2-8 °С реактиви зберігають стабільність протягом всього терміну придатності, зазначеного на упаковці. На борту аналізатора реактиви стабільні 11 тижнів при 2-10 °С.

Концентрації в тесті

1-ЗАЛІЗО

лимонна кислота (рН 1.9) 200 ммоль/л
тіосечовина 90 ммоль/л
детергент 6 %

2-ЗАЛІЗО

аскорбат натрію 125 ммоль/л
хлорид натрію 50 ммоль/л
3-(2-піридил)-5,6-біс(2-[5-фурилсульфо]кислота)-1,2,4-триазинна натрієва сіль (ферозин) ≥ 5 ммоль/л
консерванти 0.2 %

Попередження і примітки

- Захищати від світла та уникати забруднення!
- Забруднений скляний посуд є найбільшим джерелом помилок. Рекоменується використання одноразового пластикового посуду. Скляний посуд повинен бути витриманий протягом декількох годин

в розчині 2M HCl, а потім ретельно промитий дистильованою водою.

- Реагент 1-ЗАЛІЗО (Кат. № 3-261) можна замовити окремо.
- 1-ЗАЛІЗО та 3-Стандарт відповідають критеріям класифікації відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

1- ЗАЛІЗО містить моноалкіловий ефір поліетиленгліколю.

3-Стандарт містить соляну кислоту.

Небезпека



H314 Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.
EUN208 Містить тіосечовину. Може викликати алергічну реакцію (1-ЗАЛІЗО).

EUN208 Містить 1-[1,3-біс(гідроксиметил)-2,5-діоксоімідазолін-4-іл]-1,3-біс(гідроксиметил) сечовину. Може викликати алергічну реакцію (2-ЗАЛІЗО).

P280 Одягати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя

P303+P361+P353 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): Негайно зніміть весь забруднений одяг. Промийте шкіру водою.

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом декількох хвилин. Видаліть контактні лінзи, якщо вони є, і це легко зробити. Продовжуйте промивати.

P310 Негайно зателефонуйте до ЦЕНТРУ З ОТРУЄНЬ або до лікаря.

ДОДАТКОВЕ УСТАТКУВАННЯ

- автоматичний аналізатор або фотометр, що дозволяє знімати покази при довжині хвилі 550 нм;
- термостат на 37 °С;
- загальне лабораторне устаткування.

БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Сироватка без слідів гемолізу, зібрана в пластикові пробірки.

Еритроцити необхідно швидко відокремити від сироватки.

Сироватка може зберігатися протягом 6 годин при температурі 15-25 °С, або 3 дні при температурі 2-8 °С.

Проте, рекомендується проводити дослідження з використанням свіжозібраного біологічного матеріалу!

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ

Програми для аналізаторів доступні за запитом.

Визначення мануальне

довжина хвилі 550 нм
температура 37 °С
кювета 1 см

Метод Reagent Start

У кювету помістити:

	Бланк (B)	Тест (T)	Стандарт (S)
1-ЗАЛІЗО	1000 мкл	1000 мкл	1000 мкл

Довести до температури визначення. Потім додати:

Стандарт	-	-	80 мкл
Сироватка	-	80 мкл	-
Дистильована вода	80 мкл	-	-

Ретельно перемішати, інкубувати 5 хвилин. Тоді зчитати абсорбцію A1 тесту (T) та стандарту (S) проти бланка (B). Потім додати:

2-ЗАЛІЗО	200 мкл	200 мкл	200 мкл
----------	---------	---------	---------

Добре змішати та після 10 хвилин інкубації зчитати абсорбцію A2 тесту (T) та стандарту (S) проти бланка (B). Інтенсивність кольору стабільна протягом 30 хвилин. Обчислити ΔA для тесту та стандарту:

$$\Delta A = (A_2 - 0.84A_1)$$

Коефіцієнт 0.84 компенсує зменшення поглинання після додавання 2-ЗАЛІЗО.

Розрахунок результатів

концентрація заліза = $\Delta A(T)/\Delta A(S)$ x концентрація стандарту

РЕФЕРЕНСНІ ВЕЛИЧИНИ

сироватка	мкг/дл	мкмоль/л
Новонароджені	100-250	17.9-44.8
Діти до 12 місяців	40-100	7.2-17.9
Діти	50-120	9.0-21.5
Дорослі жінки	50-170	9.0-30.4
Дорослі чоловіки	65-175	11.6-31.3

Кожній лабораторії рекомендується встановити свої власні норми, характерні для обстежуваного контингенту.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Для внутрішнього контролю якості рекомендується використовувати контрольні сироватки CORMAY SERUM HN (Кат. № 5-172) і CORMAY SERUM HP (Кат. № 5-173) для кожної серії вимірювань.

Для калібрування мануальних визначень рекомендується використовувати IRON STANDARD 56 (Кат. № 5-133) або 3-СТАНДАРТ.

Для калібрування автоматичних аналізаторів рекомендується використовувати CORMAY MULTICALIBRATOR РІВЕНЬ 1 (Кат. № 5-174; 5-176) або CORMAY MULTICALIBRATOR РІВЕНЬ 2 (Кат. № 5-175; 5-177) рекомендується **залежно від номера партії калібратора**.

Калібрування рекомендується проводити кожні 11 тижнів, при кожній зміні лота реагентів і в разі потреби, наприклад, якщо результати визначення контрольних сироваток не потрапляють в референтний діапазон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ

Ці метрологічні характеристики були отримані за допомогою автоматичного аналізатора Biolis 24i Premium. У випадку проведення аналізу на іншому аналізаторі або вручну отримані результати можуть відрізнятися.

- **Чутливість:** 3.6 мкг/дл (0.644 мкмоль/л).
- **Лінійність:** до 1000 мкг/дл (179 мкмоль/л).
Для більш високих концентрацій необхідно розбавити зразок 0,9% NaCl і повторити аналіз. Помножте результат на коефіцієнт розведення.
- **Специфічність/Інтерференція**
Аскорбінова кислота до 62 мг/л, білірубін до 20 мг/дл, тригліцериди до 1000 мг/дл та мідь до 500 мкг/дл не впливають на результати. Гемоглобін інтерферує навіть в невеликій кількості.

Точність

Повторюваність (між серіями) n = 10	Середнє [мкг/дл]	SD [мкг/дл]	CV [%]
Рівень 1	33.86	0.47	1.39
Рівень 2	317.54	1.76	0.55

Відтворюваність (між днями) n = 10	Середнє [мкг/дл]	SD [мкг/дл]	CV [%]
Рівень 1	243.77	1.97	0.81
Рівень 2	65.91	1.39	2.10

Порівняння методів

Порівняння між реагентом CORMAY (y) та іншим комерційним аналізом (x) з використанням 102 зразків дало наступні результати:

$$y = 0.9325x + 7.8482 \text{ мкг/дл};$$

$$R = 0.9925 \quad (R - \text{коефіцієнт кореляції})$$

ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ

IRON STANDARD 56 простежуються прямим спектрофотометричним методом.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно вимог місцевого законодавства.



ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092 м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

