

C-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК УЛЬТРА КАЛІБРАТОРИ

CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS

Кат. №: 4-276

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору

CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS

Склад набору

5 x 2 мл (ml)

Кат. №

4-276

ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS призначений для калібрування визначення С-реактивного білка на автоматичних аналізаторах.

Калібратори повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro* кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

ВСТУП

СРБ (С-реактивний білок) - це білок гострої фази, концентрація якого збільшується внаслідок запального процесу, особливо у відповідь на пневмококові (бактеріальні) інфекційні, гістолітичні та інші захворювання. СРБ використовується як маркер або загальний діагностичний індикатор інфекцій та запалення, а також є монітором реакції пацієнта на терапію та оперативне втручання. Крім того, регулярні вимірювання СРБ у немовлят можуть бути ефективною допомогою при ранній діагностиці інфекційних захворювань.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набір CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS готується шляхом розведення С-реактивного білка з нормальною сироваткою людини в різних концентраціях.

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Точні концентрації СРБ зазначені на етикетці кожного флакона.

УПАКОВКА

	Концентрація	Об'єм
CRP ULTRA CALIBRATOR 1	0,5 мг/дл (mg/dl)	1 x 2 мл (ml)
CRP ULTRA CALIBRATOR 2	2 мг/дл (mg/dl)	1 x 2 мл (ml)
CRP ULTRA CALIBRATOR 3	4 мг/дл (mg/dl)	1 x 2 мл (ml)
CRP ULTRA CALIBRATOR 4	16 мг/дл (mg/dl)	1 x 2 мл (ml)
CRP ULTRA CALIBRATOR 5	32 мг/дл (mg/dl)	1 x 2 мл (ml)

ПІДГОТОВКА І ЗБЕРІГАННЯ

Калібратори готові до використання.

Нерозкритий калібратор стабільний при температурі 2-10 °C (°C) до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі.

Після першого відкриття калібратор стабільний упродовж 12 тижнів при 2-10 °C (°C).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів та уникати забруднення!
- Так як колір ковпачків змінюється залежно від концентрації СРБ у флаконах, будьте уважні, щоб не переплутати ковпачки.
- Не змішувати калібратори з калібраторами з інших наборів або партій.
- Калібратори основані на людській сироватці, яка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (HcAg) і антитіл до ВІЛ, і виявилася нереактивною. Проте, їх слід розглядати як такі, що здатні передавати інфекційне захворювання.
- Звертатися до паспорту безпеки для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

СРБ калібратори готуються відповідно до референсного матеріалу ERM-DA472.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

