

α-ФЕТОПРОТЕЇН КАЛІБРАТОРИ

CORMAY AFP CALIBRATORS

Кат. №: 4-282

Дата випуску інструкції: 05-2018



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору
CORMAY AFP CALIBRATORS

Склад набору
4 x 1 мл

Кат. №
4-282

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Калібратори для визначення концентрації α-фетопропротеїнів. Калібратори повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ВСТУП

α-фетопропротеїн (АФП) є фетопропротеїном з молекулярною масою близько 70 кДа, що містить близько 3% цукру. У той час як він присутній у високій концентрації в період внутрішньоутробного росту, його концентрація швидко знижується після народження і присутній на вкрай низькому рівні в нормальній людській крові.

АФП показує помітний ріст первинного раку печінки і має велике діагностичне значення. Вважається також, що коливання в крові АФП корисні для оцінки прогресу, ефектів терапії та післяопераційного прогнозу гепатому.

Набір КАЛІБРАТОРІВ CORMAY AFP розроблений додаванням α-фетопропротеїну в об'єднану людську сироватку в різних концентраціях. Концентрації наведені на кожному флаконі і в цьому наборі вставки.

Набір КАЛІБРАТОРІВ CORMAY AFP повинен використовуватися для калібрування визначень АФП на автоматичних аналізаторах.

ПАКУВАННЯ

Калібратор	Об'єм
0 нг/мл	1 x 1 мл
25 нг/мл	1 x 1 мл
100 нг/мл	1 x 1 мл
250 нг/мл	1 x 1 мл

Калібратори готові до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Нерозкритий калібратор стабільний при 2-10 °С до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від світла.
- Не змінюйте ковпачки між флаконами.
- Не змішувати калібратори з калібраторами з інших флаконів.
- Використовувати калібратори відповідно до даної інструкції.
- Калібратори засновані на людській сироватці, яка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (HCV) і антитіл до ВІЛ, і виявилися неактивними. Тим не менш, з ними необхідно поводитись як з потенційно біологічно небезпечним матеріалом з дотриманням усіх необхідних заходів обережності.
- Калібратори містять азид натрію (< 0.1%) в якості консерванту. Уникайте контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратори AFP підготовлені відповідно до Японських стандартів.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092 м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

