

ІМУНО-КОНТРОЛЬ III

CORMAY IMMUNO-CONTROL III

Кат. №: **4-291**

Дата випуску інструкції: **12-2023**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY IMMUNO-CONTROL III	1 x 2 мл (мл)	4-291

ПРИЗНАЧЕННЯ

CORMAY IMMUNO-CONTROL III призначається для використання як контрольна сироватка мультианалітів при вимірюванні різних білків в сироватці людини.

Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CORMAY IMMUNO-CONTROL III є біологічною рідиною людини, розведеною в буфері HEPES (pH 7.4), що містить стабілізатори, консервант і наступні білки людини: альфа-1 антитрипсин, альфа-1 кислий глікопротеїн, антитромбін III, комплемент C3, комплемент C4, церулоплазмін, гаптоглобін, IgA, IgG, IgM і трансферин.

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Присвоєні значення окремих білків, різні для кожної партії, вказані на аналітичному листі, що входить до складу набору.

СКЛАД НАБОРУ

IMMUNO-CONTROL III 1 x 2 мл (мл)

ПІДГОТОВКА І ЗБЕРІГАННЯ

Сироватка готова до використання.

При 2-8 °C (°C) сироватка стабільна до дати придатності, зазначеної на упаковці. Зберігати закритими, уникати контамінації.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Контролі на основі людської сироватки були протестовані на HBsAg та антитіла до ВІЛ і ВГС і виявились нереактивними. Проте з цим матеріалом слід поводитися як з потенційно небезпечними і здатним передавати інфекційні захворювання.
- Звертатися до паспорту безпеки для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.

ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ

Значення задані за референсним матеріалом - CRM 470.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.

ЛІТЕРАТУРА

1. Johnson, A.M.: A new international preparation for proteins in human serum, Arch. Pathol. Lab. Med. 117 (1993) 29-31.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

