

ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН ПРЯМИЙ КОНТРОЛІ

CORMAY HbA_{1c} DIRECT CONTROLS

Кат. №: 4-328

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

CORMAY HbA_{1c} DIRECT CONTROLS

Кат. №: 4-328

4 x 0.5 мл (мл)

HbA_{1c} DIRECT CONTROL N

2 x 0.5 мл (мл)

HbA_{1c} DIRECT CONTROL P

2 x 0.5 мл (мл)

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНТРОЛІ CORMAY HbA_{1c} DIRECT (КОНТРОЛЬ НОРМА та КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГІЯ) призначені для рутинного контролю якості концентрації гемоглобіну A_{1c}.

Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ВСТУП

Визначення HbA_{1c} найчастіше виконують для оцінки глікемічного контролю при цукровому діабеті. Значення HbA_{1c} забезпечують показники рівня глюкози протягом попередніх 4-8 тижнів.

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Точні значення гемоглобіну A_{1c} вказані на аркуші аналізу, що входить до складу набору.

СКЛАД НАБОРУ

HbA_{1c} DIRECT CONTROL N 2 x 0.5 мл (мл)

HbA_{1c} DIRECT CONTROL P 2 x 0.5 мл (мл)

РОЗВЕДЕННЯ

1. Обережно відкрити флакон (КОНТРОЛЬ НОРМА або КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГІЯ) і додайте рівно 0.5 мл (мл) деіонізованої води.
2. Закрити, обережно змішати протягом 10 хвилин, поки весь матеріал не розчиниться.
3. Розведені контролі можуть бути розділені на порції та заморожені при -20 °C (°C). Не заморожувати і не розморожувати більше одного разу.
4. Перед початком аналізу відновлені контролі HbA_{1c} DIRECT слід обробляти ГЕМОЛІЗУЮЧИМ РЕАГЕНТОМ відповідно до інструкції HbA_{1c} DIRECT.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Невідкритий контроль стабільний при 2-8 °C (°C) до дати закінчення терміну придатності, нанесеної на флакон.
- Стабільність після розведення:
 - 1 місяць при 2-8 °C (°C)
 - 2 місяці при -20 °C (°C).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів і уникати забруднення!
- Контроль базується на крові людини, яка була перевірена на HbsAg і антитіла до ВІЛ і ВГС і виявилася нереактивною. Однак із цим матеріалом слід поводитись як із таким, що може передавати інфекційні захворювання.
- Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками.
- Звертатися до паспорту безпеки для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

PZ KORMEJ S.A.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

