

Д-ДИМЕР КОНТРОЛЬ

CORMAY D-DIMER CONTROLS

Кат. №: 4-459

Дата випуску інструкції: 03-2019



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

CORMAY D-DIMER CONTROLS

4 x 0.5 мл

4-459

ВСТУП

CORMAY D-DIMER CONTROLS призначений для використання як контрольна сироватка при вимірюванні концентрації Д-Димера. Набір містить ліофілізовану контрольну сироватку, що містить Д-Димер двох рівнів (низький - L і високий - H). Точна концентрація Д-Димера (мкг/мл FEU) вказана на етикетці.

Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ВІДНОВЛЕННЯ

Обережно зніміть гумову кришку з флакона і додайте 0,5 мл Розчинника Д-Димера у флакон. Закрийте і залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин, обережно обертаючи, щоб розчинити вміст.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

1. Ліофілізована сироватка залишається стабільною при зберіганні при 2-10 °С до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці продукту.
2. Компоненти в розведеній контрольній сироватці стабільні упродовж 2 тижнів при 2-10 °С.

ПРИМІТКИ

1. Контрольна сироватка заснована на людській сироватці, яка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (HCV) і антитіл до ВІЛ, і виявилася неактивною. Проте, її слід розглядати як таку, що здатна передавати інфекційне захворювання.
2. Розчинник D-DIMER DILUENT наявний у наборах для визначення концентрації Д-Димера.
3. Не змішуйте різні партії.
4. Не використовуйте після закінчення терміну придатності.
5. Розчинник D-DIMER DILUENT містить азид натрію (< 1 г/л) в якості консерванту. Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.

вул. Віосенна, 22

05-092 м. Ломянкі, Польща

тел.: +48 (0) 81 749 44 00

факс: +48 (0) 81 749 44 34

<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»

вул. Чорновола, 97

м. Івано-Франківськ, 76005

тел.: +38 (0342) 775 122

факс: +38 (0342) 775 123

e-mail: info@diameb.ua

www.diameb.ua

