

МІКРОАЛЬБУМІН КОНТРОЛЬ

CORMAY MICROALBUMIN CONTROL



ВИРОБНИК

Кат. №: **4-461**

Дата випуску інструкції: **12-2023**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY MICROALBUMIN CONTROL	1 x 2 мл (ml)	4-461

Контрольна сироватка CORMAY MICROALBUMIN CONTROL призначена для рутинного контролю якості при вимірюванні альбуміну в сечі та в спинномозковій рідині.

Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контрольна сироватка CORMAY MICROALBUMIN CONTROL готується з людської сироватки, розведеної сольовим розчином. Вона містить консерванти, що пригнічують мікробний ріст.

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Точні концентрації альбуміну, різні для кожної партії, зазначені на етикетці кожного флакону.

СКЛАД НАБОРУ

MICROALBUMIN CONTROL 1 x 2 мл (ml)

ПІДГОТОВКА

Контрольна сироватка готова до використання.
Перед кожним використанням перемішати, обережно перевертаючи флакон.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Щільно закрита контрольна сироватка стабільна при 2-8 °C (°C) до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Після відкриття контрольна сироватка стабільна упродовж 4 тижнів за умов зберігання при 2-8 °C (°C).
- Не заморозувати!**

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів і уникати забруднення!
- Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Контрольна сироватка базується на сироватці крові людини, яка була протестована на HBsAg та антитіла до ВІЛ та ВГС, і було виявлено, що вона не реактивна. Проте, цей матеріал слід розглядати як такий, що здатний передавати інфекційне захворювання.
- Звертатися до паспорту безпеки для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

