

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300

GLUCOSE STANDARD 300

Кат. №: 5-122

Дата випуску інструкції: 12-2019



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Формат набору	Кат. №:
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100	1 x 5 мл	5-121
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300	1 x 5 мл	5-122

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 та ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300 призначені для калібрування визначення глюкози в сироватці крові або плазмі та спинномозковій рідині за допомогою ручного аналізу.

Стандарти повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro*, кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

ВСТУП

Глюкоза - це простий шестивуглецевий цукор. Окислювальний метаболізм глюкози забезпечує енергію для більшості клітинних процесів. Рівень глюкози в крові жорстко контролюється кількома гормонами. Підвищений рівень глюкози є класичною ознакою цукрового діабету. Аномалії рівня глюкози (гіпер- або гіпоглікемія) можуть бути спричинені також пухлинами підшлункової залози та захворюваннями печінки, щитовидної залози або надниркових залоз.

СКЛАД

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 та ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300 є однорівневими рідинними стандартами, приготованими на буферній основі. Точна концентрація стандарту надрукована на етикетці кожного флакона.

ПІДГОТОВКА ТА ЗБЕРІГАННЯ

Стандарти готові до використання.

Стандарти при зберіганні при температурі 2-25 °C стабільні до закінчення терміну придатності, надрукованого на флаконі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Зберігайте стандарти щільно закритими, коли вони не використовуються.
- Для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання виробу зверніться до інформаційного паспорта безпеки.

ВІДСТЕЖЕННЯ

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 та ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300 простежуються до референсного матеріалу SRM 965B.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, зверніться до місцевих законодавчих вимог.



ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092 м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕВ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

