

ПРОКАЛЬЦИТОНІН КОНТРОЛІ

CORMAY PROCALCITONIN CONTROLS

Кат. №: 5-166

Дата випуску інструкції: 01-2018



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY PROCALCITONIN CONTROLS	2 x 3 мл (мл)	5-166

Набір CORMAY КОНТРОЛІ ПРОКАЛЬЦИТОНІНУ призначені для рутинного контролю якості визначення прокальцитоніну в сироватці та плазмі крові людини на автоматичних аналізаторах.

Контролі поставляються у ліофілізованому вигляді (2 флакони).

Точна концентрація контролю надрукована на етикетці кожного флакона (нг/мл).

Для кожної лабораторії рекомендується встановити власні середні значення та прийнятні діапазони.

ХАРАКТЕРИСТИКА

CORMAY КОНТРОЛІ ПРОКАЛЬЦИТОНІНУ готують із сироватки людини, що містить Прокальцитонін різного рівня та азид натрію (< 0.1%) як консервант.

ПАКУВАННЯ

КОНТРОЛЬ 1
КОНТРОЛЬ 2

Розмір
1 x 3 мл (мл)
1 x 3 мл (мл)

ВІДНОВЛЕННЯ

- Відкрийте флакон обережно і додайте рівно **3 мл холодної (2-8 °C) деіонізованої води.**
- Закрийте флакон гумовою кришкою і витримайте **5 хвилин** при кімнатній температурі, подалі від світла.
- Злегка** перемішайте кілька разів, щоб переконатись, що вміст повністю розчинено.
- Перед використанням змішайте вміст, кілька разів обертаючи флакон. **Не трясіть! Уникайте формування піни!**

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Нерозкриті флакони, що містять ліофілізований контроль, що зберігаються при температурі 2-8 °C (°C), стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 - Відновлені контрольні сироватки стабільні протягом:
 - 24 години при кімнатній температурі,
 - 7 днів при зберіганні при температурі 2-8 °C (°C),
 - 3 місяці при зберіганні при температурі -20 °C (°C)
- Відновлені аліквоти стабільні після 3 циклів заморожування/відтавання.
- Контролі слід зберігати щільно закритими.
 - Не залишайте контрольні сироватки при кімнатній температурі тривалий час.**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностичного використання in vitro.
- Контролі повинні використовуватися тільки за призначенням, відповідним кваліфікованим персоналом лабораторії, у відповідних лабораторних умовах.
- Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
- Контролі виготовлені на основі сироватки крові людини, яка була випробувана на HBsAg та антитіла до ВІЛ та ВГС, і виявилась неактивною. Тим не менш, матеріали містять речовини людського походження і повинні бути оброблені з належною обережністю.
- Контрольна сироватка містить < 0.1% азиду натрію в якості консерванту. Уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

