

СИРОВАТКА ЛП

CORMAY SERUM HP

Кат. №: 5-173

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригінала і перекладу інструкції повинні збігатися.

ПРИЗНАЧЕННЯ

CORMAY SERUM HN/CORMAY SERUM HP призначена для рутинного контролю якості неорганічних, органічних та ферментних компонентів.

Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CORMAY SERUM HN/CORMAY SERUM HP є ліофілізованою сироваткою людського походження.

Вказані значення розраховані на основі результатів, отриманих у десятих лабораторіях, на різних аналізаторах і ручними методами. Для більшості аналітів значення в сироватці CORMAY SERUM HN знаходяться в межах норми для дорослих; а в сироватці CORMAY SERUM HP вони здебільшого патологічні.

ВКАЗАНІ ЗНАЧЕННЯ

Значення для вимірюваних параметрів, різні для кожної партії, додаються на окремому аркуші.

Кожній лабораторії рекомендується визначити свої власні цільові значення та референсний діапазон.

ПАКУВАННЯ

CORMAY CONTROL SERUM HN	4 x 5 мл (мл)	Кат. № 5-172
CORMAY CONTROL SERUM HP	4 x 5 мл (мл)	Кат. № 5-173

ВІДНОВЛЕННЯ

- Обережно відкрити флакон і додати **рівно 5 мл (мл)** дистильованої води при температурі 20-25 °C (°C).
- Закрити гумовою пробкою і залишити на **30 хвилин** (у випадку визначення ALP протягом 1 години) подалі від яскравого світла.
- Обережно** перемішати кілька разів протягом періоду відновлення, щоб впевнитись, що вміст повністю розчинився.
- Перед використанням перемішати вміст шляхом інвертування флакона кілька разів. **Не струшувати! Уникати утворення піни!**

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Ліофілізована сироватка залишається стабільною при 2-8 °C (°C) до закінчення терміну придатності, вказаного на флаконі.
- Складові у відновленій контрольній сироватці стабільні протягом (крім параметрів, вказаних в зауваженнях):

при температурі 2-8 °C (°C)	7 днів
при температурі -20 °C (°C)	30 днів

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Захищати від прямого сонячного проміння та уникати забруднень!
- З цим продуктом слід поводитись так само, як і зі зразками пацієнтів, і аналізувати їх відповідно до інструкцій, що додаються до використовуваного реагенту.
- При використанні для контролю якості при визначенні АСР, АЛАТ, АСАТ, АЛР, ВІЛ DIRECT, сироватку CORMAY SERUM HN/HP можна зберігати до 3 днів при 2-8 °C (°C) після відновлення.
- Стабільність контрольної сироватки після відновлення, призначеної для контролю якості досліджень активності АСР, становить 7 днів при -20 °C (°C).
- Білірубін, а також інші органічні сполуки є чутливими до світла, тому рекомендується, щоб сироватка зберігалася в темряві.

- Перед вимірюванням активності лужної фосфатази відновлену або розморожену сироватку залишають на 1 годину закритою при температурі 20-25 °C (°C) для забезпечення повного відтворення ферменту.
- У разі мікробного забруднення або надмірної каламутності відновленої сироватки не використовуйте її для контролю якості аналізів.
- Це контрольна сироватка не призначена для використання в якості калібратора.
- Рекомендується тільки одне заморожування відновленої сироватки! Підготовка порцій та заморожування має бути зроблено відразу ж після відновлення. Для заморожування підготувати порції сироватки не менше 500 мкл (μl) в невеликих (1.5 мл (ml)), щільно закритих флаконах. Розморожувати при кімнатній температурі протягом приблизно 30 хвилин (у випадку визначення АЛР протягом 1 години). Обережно перемішувати кілька разів при відтаванні.
- Контролі виготовлені на основі людської сироватки та були протестовані на HBsAg, антитіла до ВІЛ і ВГС і виявились нереактивними. Однак з цим матеріалом слід поводитись як з потенційно інфікованим.
- При використанні прямого методу визначення здатності до зв'язування загального заліза (dTIBC) для внутрішнього контролю якості рекомендується використовувати неморожену контрольну сироватку.
- EUN208: Містить гентаміцин, сульфат (сіль). Може викликати алергічну реакцію.
- EUN210: Паспорт безпеки доступний за запитом.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Дотримуватись вимог місцевого законодавства.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

