

Тригліцериди 1000 мг/дл

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ

Порівняння між даним набором (y) і доступним на ринку аналізом (x) дало наступні результати:

$$y = 1.030x + 0.0042; r = 0.991.$$

КАЛІБРУВАННЯ

Аналіз вимагає використання стандарту міді або калібратора.

Ми рекомендуємо **Стандарт Міді** Dialab.

Стандартне значення відстежується за допомогою ICP-SFMS.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Усі контрольні сироватки з значеннями Міді, визначені цим способом, можуть бути використані.

Ми рекомендуємо контрольні сироватки Dialab **Diacon N** (контрольна сироватка зі значеннями в нормальному діапазоні) та **Diacon P** (контрольна сироватка з значеннями в патологічному діапазоні).

АВТОМАТИЗАЦІЯ

За запитом можуть бути виготовлені спеціальні адаптери для автоматизованих аналізаторів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Тільки для діагностики in vitro.
2. Будь ласка, зверніться до листів безпеки та дотримуйтесь необхідних запобіжних заходів при використанні лабораторних реагентів.
3. Для діагностичних цілей результати завжди слід оцінювати з історією хвороби, клінічними оглядами та іншими даними.
4. Тільки для професійного використання!

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Дотримуйтесь законодавства по утилізації відходів.



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

