

# КОНТРОЛЬ АНАЛІЗУ СЕЧІ

## CORMAY URINALYSIS CONTROL

Кат. №: 6-054

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

CORMAY URINALYSIS CONTROLS

2 x 12 мл (мл)

Кат. №  
6-054

### ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНТРОЛІ CORMAY ДЛЯ АНАЛІЗУ СЕЧІ призначені для використання в якості аналізованої сечі для контролю якості з метою контролю точності процедур аналізу сечі.

Контроль повинен використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛІ CORMAY ДЛЯ АНАЛІЗУ СЕЧІ готують із сечі людини з доданими людськими еритроцитами, імітованими лейкоцитами, складовими тваринного походження, хімікатами, консервантами та стабілізаторами. Контроль пропонується в рідкому вигляді.

### ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Присвоєні значення жовчних кислот, різні для кожної партії, вказані на аналітичному листі.

### СКЛАД НАБОРУ

КОНТРОЛЬ CORMAY ДЛЯ АНАЛІЗУ СЕЧІ РІВЕНЬ 1 1 x 12 мл (мл)  
КОНТРОЛЬ CORMAY ДЛЯ АНАЛІЗУ СЕЧІ РІВЕНЬ 2 1 x 12 мл (мл)

### ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

1. Вийняти контролі з холодильника і довести до кімнатної температури (18-25 °C (°C)).
2. Акуратно покрутити, щоб забезпечити однорідність вмісту. Уникати піноутворення.
3. Нанести прямо на смужки, використовуючи, наприклад, піпетку Пастера.
4. Використовувати контролі як зразок пацієнта відповідно до вимог методу тестування.
5. негайно повторно закрити ємності з контролями та повернути їх до температури 2-8 °C (°C), коли вони не використовуються.

### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Контролі аналізу сечі залишаються стабільними до дати закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці продукту, якщо зберігати їх не відкритими при температурі 2-8 °C (°C).
- Зберігати контролі аналізу сечі щільно закритими, уникати забруднень.
- Не використовувати контролі, якщо спостерігається надмірне помутніння або наявність будь-яких ознак мікробного забруднення.
- Продукт після відкриття та зберігання щільно закритим при 2-8 °C (°C), буде стабільним протягом 30 днів.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Використовувати контроль сечі з урахуванням аналітичного діапазону конкретних діагностичних наборів для визначення показників, включених до таблиці значень.
- Не інтерпретувати результати контрольного матеріалу візуально на основі кольорової діаграми на етикетці флакону CORMAY URINE STRIPS (кат. № 6-050, 6-051, 6-055, X-945). Інтерпретація результатів при візуальному зчитуванні призначена тільки для зразків сечі пацієнта. Результати контрольного матеріалу слід зчитувати тільки з використанням аналізаторів та аналітичного листа, що входить до комплексу.
- Сироватку кожного донора, що надає сечу для аналізу сечі, перевіряли на антитіла до ВІЛ, ВГВ та ВГС і виявлено, що вони не є реактивними. Однак до контролю сечі слід ставитись, як до такого, що здатен

передавати інфекційне захворювання.

- Цей продукт не призначений для використання в якості стандарту.
- Містить гентаміцин.
- Контролі CORMAY для аналізу сечі відповідають критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

КОНТРОЛІ CORMAY ДЛЯ АНАЛІЗУ СЕЧІ містять реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1).

**УВАГА:**



- H317 Може викликати алергічну шкірну реакцію.
- H412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.
- P280 Носити захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.
- P302+P352 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Вимити великою кількістю води з милом.
- P273 Уникати потрапляння в навколишнє середовище.

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



### ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.  
Wiosenna 22,  
05-092 Lomianki, Poland  
phone: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

PZ KORMEY S.A.  
вул. Віосенна, 22  
05-092, м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

