

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ

LYSING REAGENT CN FREE

Кат. №: 8-890

Дата випуску інструкції: 03-2022



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва	Варіант	Кат. №
ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ	1 л (L)	8-890

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ призначений для лізису еритроцитів для вивільнення гемоглобіну для подальшого визначення гемоглобіну на гематологічних аналізаторах ABX Miros 60 та ABX Micros ES 60. Він готує лейкоцити до процесу диференціювання субпопуляцій. Призначений тільки для діагностики *in vitro*, для використання медичними працівниками.

ПРИНЦИП ДІЇ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ знаходиться на борту аналізатора. Завдяки лізуючим властивостям реагенту можна порушити клітинну мембрану еритроцитів і звільнити клітинний вміст для підготовки до подальшого аналізу. ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ містить поверхнево-активні речовини, які лізують еритроцити, і лейкозахисні агенти, які захищають стан лейкоцитів, дозволяючи диференціювати субпопуляції.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН В РЕАГЕНТІ

солі четвертинного амонію 2.47 %
сульфат натрію
хлористий натрій

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТУ

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

Після відкриття реагент стабільний 90 днів при кімнатній температурі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Захищати від прямих сонячних променів!
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішуйте залишки реагенту з реагентом із нової упаковки.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами та контролями.
- Уникайте скидання в каналізацію або навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до MSDS для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- EUN210 Паспорт безпеки надається за запитом.

ПРИЛАДИ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЄДНАННІ З РЕАГЕНТОМ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ призначений для використання в поєднанні з розчинником, очисним реагентом і відповідним гематологічним аналізатором.

Назва	Кат. №
РОЗЧИННИК (20 л (L))	8-866
РОЗЧИННИК (10 л (L))	8-886
ОЧИСНИК	8-868
ABX Micros 60	Н/Д
ABX Micros ES 60	Н/Д

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ готовий до використання.

Перед першим використанням нерозкритий реагент необхідно зберігати не менше 24 годин при кімнатній температурі.

Дотримуйтеся інструкції з експлуатації аналізатора.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ¹

Після використання з реагентами слід поводитися як з потенційно інфекційними та утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

- Залишки реагентів: 18 01 07*
- Порожні пакунки: 15 01 02*
- Стічні води з аналізатора: 18 01 03*

ІНЦИДЕНТИ²

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави-члена, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

1. European Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) of 9 April 2018.
2. Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

Попередня версія: 51_03_13_002_02	Поточна версія: 51_03_13_011_01
Створення нового формату документа.	



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

