

## КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГІЧНИЙ

### 90201, Dia-MULTI P

Каталог. №: **90201**

Виробник: **Diagon (Угорщина)**

Методика від **02- 03-2009**

Версія: **1**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: **90212**

**12 x 1 мл**

Кат. №: **90201**

**1 x 1 мл**

#### НАЗВА ПРОДУКТУ

Dia-MULTI P

#### ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

Для забезпечення якості або контролю аналізів коагуляції: антитромбін (АТ) для діагностики in vitro.

#### ОПИС ПРОДУКТУ

Dia-MULTI P (Кат. №: 90212, 90201) являє собою ліофілізовану, цитратно-антикоагульовану людську плазму, з вмістом коагулянтів в межах або поблизу референтних значень для нормальних індивідуумів. Цей контроль є дійсним тільки для АТ.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей продукт містить речовини людського походження і вважається інфекційним. Продукт слід розглядати як плазму забір від пацієнта. З метою мінімізації небезпеки інфекції, кожну одиницю плазми, яка була використана під час виробництва, була перевірена і не виявлено антитіл до ВІЛ, вірусу гепатиту В і вірусу гепатиту С.

#### РОЗВЕДЕННЯ

- 1) Перед відкриттям, потрусіть пляшку, щоб перемішати порошкоподібний матеріал, що накопичився на дні.
- 2) Додайте 1,00 мл води хорошої лабораторної якості. Температура води повинна бути від 15 до 25 °С.
- 3) Після додавання води знову закрийте пляшку і поверніть її десять або більше разів між долонями у вертикальному положенні, назад і вперед, щоб розчинити залишки порошку на внутрішній поверхні пляшки.
- 4) Через 15 хвилин контрольна плазма готова до використання. Контролюйте візуально, щоб весь матеріал повністю розчинився, якщо не використовуєте змішувач.

#### ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Закритий реагент стабільний до дати закінчення терміну за умови зберігання при температурі 2-8 °С. Стабільність після розведення: 12 годин при 15 - 25°C в оригінальному флаконі.  
12 годин при температурі 2 - 8 °С в оригінальному флаконі. (Переконайтеся, що перед використанням контроль кімнатної температури).

#### ВИРОБНИК



DIAGON Ltd.

Вул. Баросс, 52. 1047 Будапешт, Угорщина

Тел. :+36 1 369 6500,

Факс: +36 1 369 6301

Е- пошта: [diagon@diagon.com](mailto:diagon@diagon.com)

Веб: [www.diagon.com](http://www.diagon.com)



#### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул.Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail:[info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)

© Переклад на українську мову ТОВ «ДІАМЕБ»

