

КОНТРОЛІ ГОМОЦИСТЕЇНУ (4 рівні)



Homocysteine Control Set (4 levels)

Кат. №: **905620SV**

Дата випуску інструкції: **2006.09.11.**
Версія **01**

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

Склад:

905620 4 x 1 мл 4-рівневий контрольний набір
905620SV 4 x 1 мл 4-рівневий контрольний набір

Додатково пропонуються:

908510 4 x 20 мл (78 мл) Набір реагентів Гомоцистеїну
908520 4 x 10 мл (39 мл) Набір реагентів Гомоцистеїну



Сироватка на основі людської для якісного контролю кількісного визначення гомоцистеїну в сироватці людини з використанням фотометричних систем

СКЛАД КОНТРОЛЮ

Контролі складаються з гомоцистеїну в сироватці людини.

ПІДГОТОВКА КОНТРОЛЮ

Контролі готові до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КОНТРОЛЮ

Зберігання: При температурі 2-8 °C

Стабільність: До закінчення терміну придатності

ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

ЗБЕРІГАТИ В ЗАХИЩЕНОМУ ВІД СВІТЛА МІСЦІ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Матеріали людського походження були тестовані за допомогою тестів, встановлених Управлінням з контролю за продуктами і ліками (США) і знайдені негативними до ВІЛ 1, ВІЛ 2, вірусу Гепатиту В і Гепатиту С.
2. Поводитись з усіма матеріалами та зразками пацієнтів як з потенційно інфекційними, використовуючи безпечні лабораторні процедури.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві легальні вимоги по знищенню відходів.

ДАННІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

Партія: HRC102200		Термін придатності: 2021-10-16	
Рівень	Лот	Задане значення (мкмоль/л)	Діапазон (мкмоль/л)
Рівень 1	HRC102200	6.82	4.82 – 8.82
Рівень 2	HRC202200	12.10	10.10 – 14.10
Рівень 3	HRC302200	28.70	24.39 – 33.00
Рівень 4	HRC402200	40.05	34.04 – 46.06



ВИРОБНИК

Діалаб GmbH
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджект М55, 2351

Вінер-Нойдорф

Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,

Факс: +43 (0) 2236 660910-30,

e-mail: office@dialab.at