

КОНТРОЛІ КАЛІЮ (2 рівні)

Potassium Control Set (2 levels)

Кат. №: 910190

Дата випуску інструкції: 2010.02.22
Версія 01



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

Сироватка на основі людської для якісного контролю кількісного визначення Калію в сироватці людини з використанням фотометричних систем

Кат. № Склад:
910190 2 x 3 мл Набір контролів, 2 рівні

Додатково пропонуються:
910110 5 x 10 мл Набір реагентів Калію

СКЛАД КОНТРОЛЮ

Контролі складаються з Калію в сироватці людини.

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЯ

Розвести вміст кожної пробірки з 3.0 мл дистильованої води; залишити при кімнатній температурі на 20 хвилин, обережно перемішуючи.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КОНТРОЛЮ

Ліофілізований:	Температура: 2-8 °С	Стабільність: До закінчення терміну придатності 2 тижні
Після відновлення:	2-8 °С	

ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ЗБЕРІГАТИ В ЗАХИЩЕНОМУ ВІД СВІТЛА МІСЦІ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріали людського походження були протестовані за допомогою тестів, встановлених Управлінням з контролю за продуктами і ліками (США) і знайдені негативними до ВІЛ 1, ВІЛ 2, вірусу Гепатиту В і Гепатиту С. Поводитись з усіма матеріалами та зразками пацієнтів як з потенційно інфекційними, використовуючи безпечні лабораторні процедури.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві легальні вимоги по знищенню відходів.

ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

Партія: LKC101210		Термін придатності: 2022-07-22	
Рівень	Партія	Задане значення (ммоль/л)	Діапазон (ммоль/л)
Рівень 1	LKC101210	3.88	3.30 – 4.46
Рівень 2	LKC201210	6.71	5.70 – 7.72



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної
продукції та лабораторних приладів в ІЗ
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351
Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

