

КОНТРОЛІ ЛІТІУ 2 рівні

Lithium Control Set (2 levels)

Каталог. №: **910290**

Дата випуску інструкції: **2010/02/22**
Версія **01**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: **910290** **Вміст:** **2 x 3 мл** Контрольний набір, 2 рівні

Додатково пропонуються:
910210 3 x 20 мл Комплект реагентів для літію

СКЛАД КОНТРОЛІВ

Контролі складаються з літію у сироватці людини.

ПІДГОТОВКА КОНТРОЛІВ

Обережно відкрийте флакон, уникайте будь-якої втрати матеріалу та відновіть рівно з 3,0 мл дистильованої води. Закрийте флакон і залишіть при кімнатній температурі протягом 30 хвилин, повністю розчинивши вміст легкими обертами.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КОНТРОЛЮ

| | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| | Температура: | Стабільність: |
| Ліофілізований: | 2 - 8°C | До закінчення терміну придатності |
| Після відновлення: | 2 - 8°C | 1 тиждень |

ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ!
ЗАХИЩАТИ ВІД СВІТЛА!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Кожна донорська одиниця сироватки при підготовці цього матеріалу була проаналізована затвердженими методами FDA і була виявлена негативною на антитіла вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ I/II Ab), поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) та антитіла до вірусу гепатиту С (HCV).

Оскільки жоден метод не може забезпечити повну гарантію щодо відсутності інфекційних агентів, однак цей матеріал та всі зразки пацієнтів потрібно обробляти так, ніби вони здатні передавати інфекційні захворювання і відповідно їх утилізувати.

ДАНИ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

| ЛОТ: LLC002150 | | Термін придатності: 2017/03 | |
|----------------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| Рівень | Лот | Встановлене значення [ммоль/л] | Діапазон [ммоль/л] |
| Рівень 1 | LLC102150 | 0.97 | 0.87 – 1.07 |
| Рівень 2 | LLC202150 | 2.21 | 1.99 – 2.43 |

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих законних вимог.



ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

