

# КОНТРОЛІ АДЕНОЗИНДЕЗАМІНАЗИ 2 рівні

## ADA Control Set (2 levels)

Каталог. №: 913880

Дата випуску інструкції: 2013/10/11  
Версія 01



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Контрольна сироватка для контролю якості кількісного визначення *in vitro* аденозиндеамінази (АДА) в сироватці або плазмі людини на фотометричних системах.

Кат. №                      Вміст  
913880                      2 x 1 мл                      Одиничний флакон

Додатково пропонуються:

913816                      6 x 25 мл                      АДА набір реагентів  
913813                      3 x 25 мл                      АДА набір реагентів

### СКЛАД КОНТРОЛІВ

Бичача сироватка та добавки.  
Азид натрію (NaN<sub>3</sub>) < 0.1 %

### ПІДГОТОВКА КОНТРОЛІВ

- Дуже обережно відкрийте флакон, щоб уникнути втрати матеріалу і відновити рівно 1.0 мл дистильованої води.
- Закрийте флакон і залишіть на 30 хвилин при кімнатній температурі, повністю розчиняючи вміст легким помішуванням або обертанням.

### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КОНТРОЛІВ

Температура зберігання: -20°C  
Стабільність: До закінчення терміну придатності  
Стабільність відновленого калібратора:  
Температура зберігання: 2 – 8 °C  
Стабільність: 1 тиждень  
Зберігати калібратор щільно закритим, якщо він не використовується.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Тільки для лабораторного використання.
- Продукт містить високоочищений коров'ячий вихідний матеріал з країн, в яких нема BSE . Виробниче підприємство не отримує, не зберігає та не обробляє жувальні матеріали із заборонених країн.
- Можливі інфекційні агенти в матеріалах були інактивовані. Оскільки жоден метод не може забезпечити повну гарантію щодо відсутності інфекційних агентів, цей матеріал повинен оброблятися таким чином, ніби він здатний передавати інфекційну хворобу та утилізувати відходи, як біологічно небезпечні або медичні відходи відповідно до чинних місцевих та національних законів.
- Додаткова інформація з безпеки щодо зберігання та поводження з даним продуктом подана у Паспорті безпеки матеріалів (MSDS) для цього продукту. MSDS доступний за запитом.
- Уникайте контакту зі шкірою та очима.
- Містить азид натрію (<0.1%) який може взаємодіяти зі свинцем або міддю і формувати вибухові сполуки. Після утилізації цього реагенту, промийте стоки великою кількістю води.

### ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих вимог.

### КОНТРОЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

ЛОТ: ADC001160		Термін придатності: 2018/02	
Рівень	Лот	Значення [О/л]	Діапазон [О/л]
Рівень 1	ADC101160	28.2	23.4 – 33.0
Рівень 2	ADC201160	141.1	117.1 – 165.1



### ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ  
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

