

КОНТРОЛІ ВІТАМІНУ Д (2 рівні)

Vitamin D Control Set (2 levels)

Каталог. №: **914382**

Дата випуску інструкції: **2014/03/05**
Версія **01**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №:
914382

Вміст:
2 x 1 мл

Додатково пропонуються:

914360 60 мл 25-ОН Вітамін D набір реагентів
914385 5 x 1 мл Вітамін D набір калібраторів

СКЛАД КОНТРОЛІВ

Об'єднана сироватка людини та добавки.
Азид натрію (NaN₃) < 0.1%

ПІДГОТОВКА КОНТРОЛІВ

Контролі готові до використання.
Перед використанням, доведіть контролі до кімнатної температури. Перед розливом покрутіть недовго. Уникайте утворення піни.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КОНТРОЛЮ

Температура зберігання: 2 – 8 °C
Стабільність: До закінчення терміну придатності
Стабільність відкритого флакону:
Температура зберігання: 2 – 8 °C
Стабільність: 4 тижні
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Кожна донорська одиниця сироватки, яка використана для підготовки цього контролю, була протестована затвердженими методами FDA та виявлена негативною до антитіл вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ I/II Ab), поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) та антитіл до вірусу гепатиту С (ВГС). Оскільки жоден метод не може забезпечити повну гарантію щодо відсутності інфекційних агентів, тому цей матеріал і всі зразки повинні оброблятися так, наче вони здатні передавати інфекційні захворювання та відповідно їх утилізувати.
- Уникайте контакту зі шкірою та очима.
- Містить азид натрію, який може взаємодіяти зі свинцем або міддю, і формувати вибухонебезпечні сполуки у водостоках. Після утилізації цього реагенти, промийте стоки великою кількістю води.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтеся місцевих законних вимог.

ДАНИ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

ЛОТ: VCC003140-01-01		Термін придатності: 2014/07	
Рівень	Лот/Символ	Встановлене значення [нг/мл]	Діапазон [нг/мл]
Рівень 1	VCC103140-01-01	22.8	16.9– 28.7
Рівень 2	VCC203140-01-01	40.6	30.5 – 50.8



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної
продукції та лабораторних приладів в ІЗ
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351
Вінер-Нойддорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

