

**КАЛІБРАТОР АСЛО, ВИСОКЕ ЗНАЧЕННЯ****ASO Calibrator High**Каталог. №: **A00728**Дата випуску інструкції: **2012/11**  
Версія **03**

Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

**Рідкий калібратор, людського походження, призначений для використання в якості калібратора в імунотурбідиметричних аналізах для ASO**

Кат. №	Вміст	
<b>A00727</b>	1x 1 мл	Калібратор ASO високий
<b>A00728</b>	1x 5 мл	Калібратор ASO високий

**СКЛАД**

Калібратор Dialab ASO Високий базується на людській сироватці, яка містить високі рівні ASO із фосфатним буферизованим розчином, який містить 1 г % бичачого сироваткового альбуміну.

Азид натрію: 0,095 %

**ПІДГОТОВКА**

Калібратор ASO Високий є рідким і готовий до використання.

**ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ**

Зберігання: при температурі 2-8 °C  
Стабільність: до закінчення терміну придатності  
Стабільність після відкриття: 6 тижнів при 2-8 °C  
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

**ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ**

- Використовуйте цей Калібратор таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу, який використовується.
- Дозвольте Калібратору досягнути кімнатної температури (22-28 °C) перед використанням.
- Калібратор не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовувані флакони зберігайте в холодильнику.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ**

- Для використання в in vitro діагностиці.
- Кожне окреме донорська одиниця використана для виготовлення білкового калібратора, була протестована на гепатит В поверхневий антиген (HbsAg), вірус анти-гепатит С (анти-HVC) і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ- 2 за вимогами FDA. Оскільки тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу ВІЛ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, ніби вони здатні передавати інфекційні хвороби.
- Реагенти, які містять азид натрію потрібно обробляти з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

**ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ**

Відповідно до місцевих правил.

**ДАНІ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ**

Значення і термін придатності є специфічними для кожного лоту.

Лот: <b>S2081</b>		Термін придатності: <b>2015-11</b>
Параметр	Визначена величина	
ASO*	193.0 МО/мл*	
ASO**	318.0 МО/мл**	
*концентрації простежуються відповідно до стандартизації ВООЗ		
**концентрації простежуються відповідно до стандартизації Dade		

**ВИРОБНИК**

Діалаб GmbH  
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджект М55, 2351  
Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)

**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

