

КОНТРОЛЬ МІКРОАЛЬБУМІНУ

Microalbumin Control

Кат. №: **A00808**

Дата випуску інструкції: **11-2012**
Версія **02**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

Рідкий людський контроль, призначений для використання як контроль при імунотурбідиметричних аналізах для мікроальбуміну

Кат. №	Вміст	
A00808	1 x 1 мл	Контроль мікроальбуміну
A00809	1 x 5 мл	Контроль мікроальбуміну

СКЛАД

Контроль Мікроальбуміну Dialab розроблений на основі плазми людини з фосфатним буферним фізіологічним розчином, стабілізований за допомогою рідини та фільтрований через фільтр розміром 0.2 мкм.
Азид натрію 0.095%

ПІДГОТОВКА

Контроль мікроальбуміну є рідким, готовим до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання: при 2 - 8 °C
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відкриття: 6 тижнів при 2-8 °C
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте цей контроль таким самим чином, як зазначено у використовуваному реагенті та/або приладі.
- Перед використанням дозвольте контролю досягти кімнатної температури (22-28 °C).
- Не тримати Контроль АРО А1/А2/В протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони щільно закритими, якщо вони не використовуються, щоб уникнути мікробного забруднення. Тримайте ампули в холодильнику, коли вони не використовуються

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

- Для діагностичного використання *in vitro*.
- Кожна донорська одиниця, призначена для використання у виробництві білкового калібратора, була перевірена на наявність поверхневих антигенів гепатиту В (HBsAg), анти-гепатиту С (анти-HCV) та анти-ВІЛ-1 та ВІЛ-2 за вимогами FDA. Оскільки тестовий метод не може гарантувати, що продукти, отримані з крові людини, не містять вірусу ВІЛ-1/2 та гепатиту В та вірусу гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися так, наче вони можуть передавати інфекційні захворювання.
- Реагенти, що містять азид натрію, повинні оброблятися з належною обережністю: не ковтати та не допускати контакту шкіри та слизових оболонок! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, зверніться до місцевих законодавчих вимог.

ДАНІ АНАЛІЗУ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ ПАРТІЇ

Значення та термін дії є специфічними для лоту.

ЛОТ: 03368		Термін придатності: 2021-09-30
Параметр	Цільове значення	Діапазон
Мікроальбумін	207 мг/л	176 – 238 мг/л
Значення простежуються відповідно до ERM-DA470k/IFCC.		



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

