

# ОЧИЩУЮЧИЙ РОЗЧИН DIATRO CLEANER

## Diatro Cleaner

Кат. №: **D5011**

Дата випуску інструкції: **30-03-2022**  
Версія **4.1**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### **Diatro-Cleaner**

Очищувач розчин для автоматизованого аналізу

Код товару: **D5011** 1 л (l)  
**D5015** 5 л (l)

Тільки для використання в *in Vitro* діагностиці

### **ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ**

Очищувач Реагент Diatro-Cleaner являє собою стабілізований і мікрофільтрований розчин детергенту для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Diatron.

Очищувач Реагент Diatro-Cleaner слід використовувати тільки з реагентами Diatron. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент застосовується з реагентами від іншого виробника.

Будь ласка, зверніться до керівництва користувача приладу для отримання додаткової інформації.

### **ІНГРЕДІЄНТИ**

Детергенти ..... < 1.0 %  
Буфери ..... < 1.0 %  
Консерванти ..... < 0.5 %  
Стабілізатори ..... < 0.5 %  
у неіонізованій воді

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Очищувач Реагент Diatro-Cleaner не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь правил належної лабораторної практики (GLP) під час роботи з реагентами.

### **ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА**

Очищувач Реагент Diatro-Cleaner призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в ЕДТК-антикоагулянт. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C (°C) або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C (°C)).

### **ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ**

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагентів не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

### **ЗАМІНА РЕАГЕНТУ**

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Зняти впускний ковпачок з контейнера реагенту, який повинен бути замінений. Підключити впускний отвір реагенту до нового контейнера з реагентом.
- Переконайтеся, що колір на кожній трубці, етикетці контейнера з реагентом і роз'єми на задній частині інструменту співпадають.
- Уникати забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливати і не змішувати залишки реагенту з одного контейнера в інший.
- Ретельно праймуйте новий реагент і виміряйте фон відповідно до Інструкції користувача приладу.
- При установці нової партії реагенту, відкалібрувати прилад, як вказано в Інструкції користувача.

### **ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТА**

- Зберігати Очищувач Реагент Diatro-Cleaner при температурі від +4 до +32 °C (°C).
- Термін придатності Diatro-Cleaner становить 48 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Викинути відкритий контейнер через 120 днів.
- Не використовувати реагент після заморожування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-якої проблеми зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для вирішення проблеми.



### **ВИРОБНИК**

ДІАТРОН МІ Плс. H-1097 м. Будапешт, вул. Таблас, 39 Угорщина Тел.: +36 14369800 Факс: +36 14369809 <a href="http://www.Diatron.com">www.Diatron.com</a>	DIATRON MI Plc. H-1097 Budapest, Táblás street, No. 39, Hungary Phone: +36 14369800 Fax: +36 14369809 <a href="http://www.Diatron.com">www.Diatron.com</a>
---	--



### **УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

