

ОЧИЩУЮЧИЙ РОЗЧИН DIATRO CLEANER

Diatro Cleaner

Кат. №: **D5015**

Дата випуску інструкції: **30-03-2022**
Версія **4.1**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Diatro-Cleaner

Очищувач розчин для автоматизованого аналізу

Код товару: **D5011** 1 л (l)
D5015 5 л (l)

Тільки для використання в *in Vitro* діагностиці

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Очищувач Реагент Diatro-Cleaner являє собою стабілізований і мікрофільтрований розчин детергенту для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Diatron.

Очищувач Реагент Diatro-Cleaner слід використовувати тільки з реагентами Diatron. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент застосовується з реагентами від іншого виробника.

Будь ласка, зверніться до керівництва користувача приладу для отримання додаткової інформації.

ІНГРЕДІЄНТИ

Детергенти < 1.0 %
Буфери < 1.0 %
Консерванти < 0.5 %
Стабілізатори < 0.5 %
у неіонізованій воді

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Очищувач Реагент Diatro-Cleaner не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь правил належної лабораторної практики (GLP) під час роботи з реагентами.

ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА

Очищувач Реагент Diatro-Cleaner призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в ЕДТК-антикоагулянт. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C (°C) або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C (°C)).

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагентів не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Зняти впускний ковпачок з контейнера реагенту, який повинен бути замінений. Підключити впускний отвір реагенту до нового контейнера з реагентом.
- Переконайтеся, що колір на кожній трубці, етикетці контейнера з реагентом і роз'ємі на задній частині інструменту співпадають.
- Уникати забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливати і не змішувати залишки реагенту з одного контейнера в інший.
- Ретельно праймуйте новий реагент і виміряйте фон відповідно до Інструкції користувача приладу.
- При установці нової партії реагенту, відкалібрувати прилад, як вказано в Інструкції користувача.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТА

- Зберігати Очищувач Реагент Diatro-Cleaner при температурі від +4 до +32 °C (°C).
- Термін придатності Diatro-Cleaner становить 48 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Викинути відкритий контейнер через 120 днів.
- Не використовувати реагент після заморожування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-якої проблеми зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для вирішення проблеми.



ВИРОБНИК

ДІАТРОН МІ Плс. Н-1097 м. Будапешт, вул. Таблас, 39 Угорщина Тел.: +36 14369800 Факс: +36 14369809 www.Diatron.com	DIATRON MI Plc. H-1097 Budapest, Táblás street, No. 39, Hungary Phone: +36 14369800 Fax: +36 14369809 www.Diatron.com
---	--



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

