

# НАБІР РЕАГЕНТІВ DIATRO 3P

## Diatro 3P Reagent Smart Pack

Кат. №: **DRP07**

Дата випуску інструкції: **17-01-2018**  
Версія **4.0**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### **Diatro-3P Набір реагентів Smart Pack**

Набір реагентів WBC-3-diff для автоматизованого аналізу

**Код продукту:** **DRP07** 1 x пакет

Тільки для діагностики *in vitro*

### **ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ**

Набір реагентів Diatro-3P Reagent Smart Pack WBC-3-diff - це набір реагентів для підрахунку еритроцитів (RBC), тромбоцитів (PLT), для вимірювання гемоглобіну (HGB) та для кількісного визначення лейкоцитів (WBC), диференціації 3-х частин лейкоцитів (LYM, MID, GRA) в крові людини на гематологічних аналізаторах Diatron Aquila.

Набір реагентів Diatro-3P Reagent Smart Pack призначений для гематологічних аналізаторів Diatron Aquila. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо застосовувати сторонні реагенти.

Будь ласка, зверніться до Посібника користувача приладу для отримання додаткової інформації.

### **ІНГРЕДІЄНТИ**

Diatro-Dil-DIFF	2.40 л
Diatro-Lyse-DIFF	0.14 л

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Набір реагентів Diatro-3P Reagent Smart Pack не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить ціаніду та азиду; не містить шкідливих інгредієнтів.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Застосовуйте Апробовані Лабораторні Методи (GLP) при роботі з реагентами.

### **ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА**

Набір реагентів Diatro-3P Reagent Smart Pack призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в антикоагулянт ЕДТК. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C).

### **ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ**

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагентів не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

### **ЗАМІНА РЕАГЕНТУ**

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Зніміть впускний ковпачок з контейнера реагенту, який повинен бути замінений. Підключіть впускний отвір реагенту до нового контейнера з реагентом.
- Уникайте забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливайте і не змішуйте залишки реагенту з одного контейнера в інший.
- Ретельно праймуйте новий реагент і виміряйте фон відповідно до Інструкції користувача приладу.
- При установці нової партії реагенту, відкалібруйте прилад, як вказано в Інструкції користувача.

### **ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТА**

- Зберігати Набір реагентів Diatro-3P Reagent Smart Pack при температурі від +4 до +32 °C.
- Термін придатності Diatro-3P Reagent Smart Pack становить 36 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Утилізуйте відкритий контейнер через 60 днів.
- Не використовуйте реагент після заморожування.
- Утилізуйте відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.



### **ВИРОБНИК**

ДІАТРОН МІ PLc  
вул. Таблас, 39  
H-1097 Будапешт, Угорщина  
Тел.: +36 14369800  
Факс: +36 14369809  
[www.diatron.com](http://www.diatron.com)



### **УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**

ТОВ «ДІАМЕВ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

