

НАБІР РЕАГЕНТІВ DIATRO 3P (НАБІР 3 4-X DRP07)

Diatro 3P Reagent Smart Pack (Set of 4xDRP07)

Кат. №: **DRP074**

Дата випуску інструкції: **30-03-2022**

Версія **2.2**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Diatro-3P Набір реагентів Smart Pack Set

Набір реагентів WBC-3-diff для автоматизованого аналізу

Код продукту:

DRP074

4 x пакет DRP07

Тільки для діагностики *in vitro*

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Набір реагентів Diatro-3P - це набір реагентів для підрахунку еритроцитів (RBC), тромбоцитів (PLT), для вимірювання гемоглобіну (HGB) та для кількісного визначення лейкоцитів (WBC), диференціації 3-х частин лейкоцитів (LYM, MID, GRA) в крові людини на гематологічних аналізаторах Diatron Aquila.

Набір реагентів Diatro-3P призначений для гематологічних аналізаторів Diatron Aquila. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо застосовувати сторонні реагенти.

Будь ласка, зверніться до Посібника користувача приладу для отримання додаткової інформації.

ІНГРЕДІЄНТИ

Diatro-Dil-DIFF	2.40 л (L)
Diatro-Lyse-DIFF	0.14 л (L)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Набір реагентів Diatro-3P не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить ціаніду та азиду; не містить шкідливих інгредієнтів.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь правил належної лабораторної практики (GLP) під час роботи з реагентами.

ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА

Набір реагентів Diatro-3P призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в ЕДТА антикоагулянт. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C (°C) або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C (°C)).

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагенту не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Зніміть впускний ковпачок з контейнера реагенту, який повинен бути замінений. Підключіть впускний отвір реагенту до нового контейнера з реагентом.
- Уникайте забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливайте і не змішуйте залишки реагенту з одного контейнера в інший.
- Ретельно прийміть новий реагент і виміряйте фон відповідно до Інструкції користувача приладу.
- При установці нової партії реагенту, відкалібруйте прилад, як вказано в Інструкції користувача.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТУ

- Зберігати Набір реагентів Diatro-3P при температурі від 15 до 30 °C (°C).
- Термін придатності Набору реагентів Diatro-3P становить 36 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Утилізуйте відкритий контейнер через 60 днів.
- Не використовуйте реагент після заморожування.
- Утилізуйте відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.



ВИРОБНИК

DIATRON MI PLC
вул. Таблас, 39
H-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 14369800
Факс: +36 14369809
www.diatron.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

