

# РЕАГЕНТ-ПАК

## ISE REAGENTS PACK

Кат. №: E-701

Дата випуску інструкції: 04-2010



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### ISE REAGENTS PACK

Кат. № E-701

#### ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE призначений для калібрування і визначення натрію, калію, хлориду, іонізованого кальцію і літію в аналізаторі електролітів ISE.

#### РЕАГЕНТИ

Кожен рідкий пакет ПАКЕТУ РЕАГЕНТІВ ISE містить:

СТАНДАРТ А	1 x 350 мл
СТАНДАРТ В	1 x 85 мл
СТАНДАРТ С	1 x 85 мл
РЕФЕРЕНСНИЙ РОЗЧИН	1 x 100 мл

#### Активні інгредієнти

		Стандарт А	Стандарт В	Стандарт С	Референсний Розчин
Натрій	ммоль/л	150.0	100.0	150.0	-
Калій	ммоль/л	5.0	1.8	5.0	-
Хлорид	ммоль/л	115.0	72.0	115.0	-
Кальцій	ммоль/л	0.9	1.5	0.9	-
Літій	ммоль/л	0.3	0.3	1.4	-
Хлорид калію	моль/л	-	-	-	1.2

#### ЗБЕРІГАННЯ

- Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні при 18-25 °С.
- Стабільність на борту: 14 тижнів.

#### ІНСТАЛЯЦІЯ

- Натисніть **YES/ТАК** після того, як на дисплеї з'явиться підказка **OPERATION FUNCTIONS/ФУНКЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**.
- Натисніть **YES/ТАК** після появи запиту **Check/Change Fluid Pack?/Перевірити/Замінити рідкий пакет?**
- Натисніть **YES/ТАК** після появи запиту **Change ISE Pack?/Замінити пакет ISE?**
- Міцно вхопіться за пакет і потягніть назовні. Якщо видалення є важким, натисніть на кінець направляючого штифта ISE REAGENTS PACK/ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE, розташованого ліворуч від вимірювальної камери всередині передньої кришки.
- Встановіть новий ISE REAGENTS PACK/ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE:
  - Перед використанням зніміть червоні пластикові ковпачки з ніпелів роз'єму.
  - Збережіть ковпачки, щоб закрити ніпелі роз'єму використаного ISE REAGENTS PACK/ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE.
  - Напишіть дату встановлення на етикетці ISE REAGENTS PACK/ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE перманентним маркером.
  - Втисніть щільно новий пакет в порожнину на лівій стороні приладу, утримуючи праву сторону приладу для стабільності.
  - Аналізатор покаже кількість залишкової рідини. Потім з'явиться запит **New Fluid Pack Installed?/Новий рідкий пакет встановлений?** Натисніть **YES/ТАК**, щоб вказати, що встановлено новий пакет реагентів. Аналізатор запитає чи Ви впевнені? Натисніть **YES/ТАК**.
- Аналізатор автоматично скидає лічильник пакета реагентів до 100% і починає калібрування системи.

#### ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностики in vitro.
- Не заморозуйте.
- ISE REAGENTS PACK/ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE **після використання** містить матеріал людського походження. Тому цей матеріал слід обробляти як такий, що здатний передавати інфекційні захворювання.
- НЕ ВИКЛЮЧАЙТЕ прилад, якщо встановлено ISE REAGENTS PACK/ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE, оскільки це може призвести до забруднення невикористаних стандартних розчинів, що залишилися в упаковці.
- ISE REAGENTS PACK/ПАКЕТ РЕАГЕНТІВ ISE повинен використовуватися кваліфікованим персоналом лабораторії тільки відповідно до призначення.

#### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



#### ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092 м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



#### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул. Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

