



Мікропробірки для забору крові

Кат. №: LUA-MNR02P, LUA-MNR25P, LUA-MNR05P, LUA-MNR10P, LUA-MCR02P, LUA-MCR25P, LUA-MCR05P, LUA-MCR10P, LUA-MKR02P, LUA-MKR25P, LUA-MKR05P, LUA-MKR10P, LUA-MER02P, LUA-MER25P, LUA-MER05P, LUA-MER10P, LUA-MLR02P, LUA-MLR25P, LUA-MLR05P, LUA-MLR10P, LUA-MFR02P, LUA-MFR25P, LUA-MFR05P, LUA-MFR10P, LUA-MGR02P, LUA-MGR25P, LUA-MGR05P, LUA-MGR08P, LUA-MNR02C, LUA-MNR25C, LUA-MNR05C, LUA-MNR10C, LUA-MCR02C, LUA-MCR25C, LUA-MCR05C, LUA-MCR10C, LUA-MER02C, LUA-MER25C, LUA-MER05C, LUA-MER10C, LUA-MKR02C, LUA-MKR25C, LUA-MKR05C, LUA-MKR10C, LUA-MLR02C, LUA-MLR25C, LUA-MLR05C, LUA-MLR10C, LUA-MFR02C, LUA-MFR25C, LUA-MFR05C, LUA-MFR10C, LUA-MGR02C, LUA-MGR25C, LUA-MGR05C, LUA-MGR08C, LUA-MNR02S, LUA-MNR25S, LUA-MNR05S, LUA-MNR10S, LUA-MCR02S, LUA-MCR25S, LUA-MCR05S, LUA-MCR10S, LUA-MER02S, LUA-MER25S, LUA-MER05S, LUA-MER10S, LUA-MKR02S, LUA-MKR25S, LUA-MKR05S, LUA-MKR10S, LUA-MLR02S, LUA-MLR25S, LUA-MLR05S, LUA-MLR10S, LUA-MFR02S, LUA-MFR25S, LUA-MFR05S, LUA-MFR10S, LUA-MGR02S, LUA-MGR25S, LUA-MGR05S, LUA-MGR08S

Дата останнього перегляду інструкції: **06.11.2023 р.** Версія 3.

Пробірка без наповнювача	Червона	Пробірка для сироватки без наповнювача
Пробірка з активатором згортання	Червона	Пробірка для сироватки з активатором згортання
Пробірка з K ₃ /K ₂ EDTA	Лавандова	Пробірка для цільної крові (гематологія)
Пробірка для глюкози	Сіра	Для забору плазми (дослідження рівня глюкози)
Пробірка з гепарином	Зелена	Пробірка плазми (клінічна хімія)
Пробірка з гелем та активатором згортання	Жовта	Для забору сироватки з гелем та активатором згортання

Стабільність

Пробірки стабільні до зазначеного терміну придатності за умови зберігання при 4...25 °C (39...77 °F).

Загальний термін придатності 18 місяців.

Наповнювачі є прозорими та безбарвними (рідини) або білими/світло-жовтими.

Не використовуйте пробірки, якщо колір змінився. Уникайте впливу прямих сонячних променів і шкідливих умов робочого середовища.







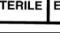





Як використовувати мікропробірку:

- Мікропробірка з гумовим ковпачком - з капіляром (лише для мікропробірки з гумовим ковпачком)
Вставити капіляр в мікропробірку із поперечно зрізаним гумовим ковпачком.
Піднести кінчик капіляра до краплі крові. Кров автоматично надходить в пробірку через капілярний ефект.
- Мікропробірка з гумовим ковпачком - з лійкою (лише для мікропробірки з гумовим ковпачком)
Вставити лійку в мікропробірку із поперечно зрізаним гумовим ковпачком.
Піднести кінчик лійки до краплі крові, щоб перенести кров у мікропробірку.
*Після забору крові обережно видалити капіляр або лійку, гумова кришка автоматично закривається.
- Мікропробірка без аксесуару
Відкрити гумовий/пластиковий ковпачок, тримати мікропробірку під кутом 30 градусів нижче місця проколу та використовувати край пробірки, щоб заповнити її.
*Обережно перевернути пробірку 6-8 разів, щоб повністю змішати кров і наповнювач.

Розміри та фасування мікропробірок

Мікропробірки з пластиковим ковпачком				
Кат. №	Назва	Об'єм, мл (ml)	Розмір, мм (mm)	Фасування
LUA-MNR02P LUA-MNR25P LUA-MNR05P LUA-MNR10P	Мікропробірка без наповнювача	0.2 0.25 0.5 1	10x44	50 шт/уп.
LUA-MCR02P LUA-MCR25P LUA-MCR05P LUA-MCR10P	Мікропробірка з активатором згортання	0.2 0.25 0.5 1	10x44	50 шт/уп.
LUA-MKR02P LUA-MKR25P LUA-MKR05P LUA-MKR10P	Мікропробірка з K ₂ EDTA	0.2 0.25 0.5 1	10x44	50 шт/уп.
LUA-MER02P LUA-MER25P LUA-MER05P LUA-MER10P	Мікропробірка з K ₃ EDTA	0.2 0.25 0.5 1	10x44	50 шт/уп.
LUA-MLR02P LUA-MLR25P LUA-MLR05P LUA-MLR10P	Мікропробірка з гепарином літію	0.2 0.25 0.5 1	10x44	50 шт/уп.
LUA-MFR02P LUA-MFR25P LUA-MFR05P LUA-MFR10P	Мікропробірка з фторидом натрію та гепарином натрію	0.2 0.25 0.5 1	10x44	50 шт/уп.
LUA-MGR02P LUA-MGR25P LUA-MGR05P LUA-MGR08P	Мікропробірка з гелем та активатором згортання	0.2 0.25 0.5 0.8	10x44	50 шт/уп.
Мікропробірки з гумовим ковпачком, з капіляром				
Кат. №	Назва	Об'єм, мл (ml)	Розмір, мм (mm)	Фасування
LUA-MNR02S LUA-MNR25S LUA-MNR05S LUA-MNR10S	Мікропробірка без наповнювача	0.2 0.25 0.5 1	8x44	40 шт/уп.
LUA-MCR02S LUA-MCR25S LUA-MCR05S LUA-MCR10S	Мікропробірка з активатором згортання	0.2 0.25 0.5 1	8x44	40 шт/уп.
LUA-MKR02S LUA-MKR25S LUA-MKR05S LUA-MKR10S	Мікропробірка з K ₂ EDTA	0.2 0.25 0.5 1	8x44	40 шт/уп.
LUA-MER02S LUA-MER25S LUA-MER05S LUA-MER10S	Мікропробірка з K ₃ EDTA	0.2 0.25 0.5 1	8x44	40 шт/уп.
LUA-MLR02S LUA-MLR25S LUA-MLR05S LUA-MLR10S	Мікропробірка з гепарином літію	0.2 0.25 0.5 1	8x44	40 шт/уп.
LUA-MFR02S LUA-MFR25S LUA-MFR05S LUA-MFR10S	Мікропробірка з фторидом натрію та гепарином натрію	0.2 0.25 0.5 1	8x44	40 шт/уп.
LUA-MGR02S LUA-MGR25S LUA-MGR05S LUA-MGR08S	Мікропробірка з гелем та активатором згортання	0.2 0.25 0.5 0.8	8x44	40 шт/уп.
Мікропробірки з гумовим ковпачком, без капіляра				
Кат. №	Назва	Об'єм, мл (ml)	Розмір, мм (mm)	Фасування
LUA-MNR02C LUA-MNR25C LUA-MNR05C LUA-MNR10C	Мікропробірка без наповнювача	0.2 0.25 0.5 1	10x44	100 шт/уп.
LUA-MCR02C LUA-MCR25C LUA-MCR05C	Мікропробірка з активатором згортання	0.2 0.25 0.5	10x44	100 шт/уп.

LUA-MCR10C		1		
LUA-MKR02C LUA-MKR25C LUA-MKR05C LUA-MKR10C	Мікропробірка з К ₂ ЕДТА	0.2 0.25 0.5 1	10x44	100 шт/уп.
LUA-MER02C LUA-MER25C LUA-MER05C LUA-MER10C	Мікропробірка з К ₃ ЕДТА	0.2 0.25 0.5 1	10x44	100 шт/уп.
LUA-MLR02C LUA-MLR25C LUA-MLR05C LUA-MLR10C	Мікропробірка з гепарином літію	0.2 0.25 0.5 1	10x44	100 шт/уп.
LUA-MFR02C LUA-MFR25C LUA-MFR05C LUA-MFR10C	Мікропробірка з фторидом натрію та гепарином натрію	0.2 0.25 0.5 1	10x44	100 шт/уп.
LUA-MGR02C LUA-MGR25C LUA-MGR05C LUA-MGR08C	Мікропробірка з гелем та активатором згортання	0.2 0.25 0.5 0.8	10x44	100 шт/уп.

Символ	Опис
	Інформація про виробника
	Дата виготовлення
	Лот партії
	Використати до
	Не використовуйте повторно
	Стерильно
	Стерилізовано оксидом етилену
	Не стерилізувати
	Не використовуйте, якщо пакет пошкоджений
	Зверніться до інструкції із застосування
	Медичний прилад для діагностики in vitro
	Національний знак відповідності Технічним регламентам



ВИРОБНИК:

ТОВ «ЛАБЮЕЙ»

вул. Петлюри, будинок 25,

м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Тел.: +380 (67) 000-20-22

Електронна адреса: info@labua.com.ua



UA.TR.116