

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК ВИСОКОЧУТЛИВИЙ

P04.02.109453-00, Hs-CRP Quality Control

Кат. № : P04.02.109453-00
Виробник : Genrui (Kumai)

Версія



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва продукту

Загальна назва: Контроль якості С-реактивний білок високочутливий (Hs-CRP)
Торгова назва: Hs-CRP QC

Специфікація упаковки

КЯ для Hs-CRP (0.2 мл/баночку, рідкий, 2 до 8°C)
Кат. №: P04.02.109453-00

Передбачуване використання

Цей продукт використовується для контролю якості С-реактивного білка на кількісному імунофлуоресцентному аналізаторі.

Основні компоненти

Рекомбінантний С-реактивний білок.

Цільові значення

Дивіться етикетку КЯ.

Зберігання та стабільність

НЕ ВІДКРИТИЙ: КЯ залишається стабільним протягом 12 місяців (див. етикетку щодо конкретної дати) при зберіганні від 2-8°C.

ВІДКРИТИЙ: КЯ залишається стабільним протягом 28 днів при 2-8°C.

Температура транспортування: 2-8°C.

Примітка: Уникайте повторного заморожування та розморожування КЯ.

Методи випробувань

Витягніть контроль з холодильника і залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин перед використанням.

1. Перемішайте контроль обережно перевертаючи його протягом 1 хвилини. Не трясіть баночку. Уникайте утворення бульбашок.
2. Обережно відкрийте кришку баночку, щоб уникнути витікання вмісту.
3. Процедура тестування КЯ така ж як і для зразка, будь ласка, зверніться до інструкції з використання набору.
4. Після проведення КЯ вчасно охолодіть невикористаний матеріал.

Застереження

1. Використовується тільки для діагностики in vitro, зверніться до Посібника з експлуатації.
2. Не використовуйте реагенти, в яких закінчився термін придатності.
3. Не використовуйте реагенти різних партій разом.
4. Реагент містить матеріали, отримані як від людини, так і від тварини, лабораторних процедур слід максимально дотримуватись.

Виробник



Genrui Biotech Inc.

Адреса: 4-10F, будинок 3, Geya Technology Park, район Гуанмін, 518106, Шеньчжень, Китай.



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

