

# КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЦИКЛІЧНИЙ ЦИТРУЛІНОВАНИЙ ПЕПТИД (ССР) (0.2 МЛ/БАНОЧКУ, ВИСОКИЙ РІВЕНЬ, ЛИШЕ ДЛЯ РЕАГЕНТІВ GENRUI) ДЛЯ PA50&54

**QC for CCP (0.2 ml/bottle, normal level, for GENRUI reagent  
ONLY) for PA50&54**

Каталог. №: P14.03.104099-00

Версія: A/0



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

## Назва продукту

Контроль якості антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)

## Специфікація упаковки

КЯ (Нормальний рівень) 0,2 мл/баночку x 2  
КЯ (Високий рівень) 0,2 мл/баночку x 2

## Призначення

КЯ ССР призначений для контролю якості виявлення антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду (ССР) шляхом in vitro діагностики імунної системи.

## Застереження

Цей продукт використовується лише для діагностики in vitro. Утилізуйте реагенти відповідно до звичайних лабораторних заходів безпеки. Абсорбувати необхідну кількість для кожного використання, а решту зразків не повертайте назад до оригінальної баночки. Якщо продукт контролю якості забруднений, стабільність компонентів знизиться, його слід припинити використовувати і вибрати новий продукт контролю якості.

## Основний склад

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)

## Зберігання і стабільність

Герметично запакований набір можна зберігати при температурі 2-8 °C протягом 12 місяців. Не заморозувати. Після відкриття, реагенти стабільні протягом 30 днів при температурі 2 - 8°C.

## Інструкції щодо використання

Продукт контролю якості є рідким і готовим до використання. Використання полягає в наступному:

1. Вийміть баночки з холодильника (2-8°C) та залишіть нагріватися до кімнатної температури протягом 5-10 хвилин перед перемішуванням.
2. Обережно інвертуйте, щонайменше 3 рази перед відбором проб, але уникайте утворення бульбашок.
3. Обережно відкривайте баночку, щоб уникнути висипання вмісту.
4. Після відбору проб, якомога швидше закрийте кришечкою та зберігайте її герметично закритою при 2 ~ 8°C.

Щодо конкретного використання, зверніться до відповідної інструкції для цього набору.

## Призначення

Методологією, яка призначила продукт контролю якості в лабораторії компанії, використовуючи набір і аналізатор специфічного білка була нефелометрія. Результат призначення вказаний на етикетці баночки КЯ.

## Умовні позначення

	Дата виробництва		Об'єм
--	------------------	--	-------

	Медичний пристрій для діагностики in vitro		Каталоговий номер
	Біологічна небезпека		Код партії
	Використати до		Температурне обмеження

## Інформація про навчання

Дивитися в навчальному посібнику.

## Довідкова інформація

Якщо потрібна допомога, звертайтеся у відділ післяпродажного обслуговування.

## Усунення несправностей

Звертайтеся у відділ післяпродажного обслуговування.



## ВИРОБНИК

ГЕНРУІ БІОТЕК ІНК.  
4-10F, Будинок 3, Технологічний Парк Гея  
Район Гуанмін, 518106  
Шеньчжень, Китай  
Тел.: + 86-755-26835560  
Факс: + 86-755-26678789  
e-mail: info@genrui-bio.com  
Веб: www.genrui-bio.com



## УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул.Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: info@diameb.ua  
www.diameb.com

