

# DS-REF РЕФЕРЕНТНИЙ ЗАПОВНЮЮЧИЙ РОЗЧИН ДЛЯ GE300 (10 МЛ)

## DS-Ref Ref. Filling Solution for GE300 (10 ml)

Кат. №: P14.03.105020-00

Дата випуску інструкції: 20-10-2017  
Версія А/6



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### Назва продукту

DS-Ref Ref. Заповнюючий Розчин.

### Пакування

10 мл/флакон

Кат. №: 42046001

### Призначення використання

Застосовується як розчин для заповнення референсного електрода.

### Принцип тестування

Не застосовується.

### Основні компоненти

Насичений розчин KCl і консервант.

### Зберігання та транспортування

Стабільний протягом 2 років при зберіганні при 2-30 °C в тіні. Продукт слід транспортувати із зовнішньою упаковкою.

### Застосовувані прилади

Аналізатори електролітів.

### Вимоги до зразка

Не застосовується.

### Методи тестування

Залийте Ref. Заповнюючий Розчин в референсний електрод. Для додаткових операцій з приладом зверніться до посібника з експлуатації електролітного аналізатора.

### Референсний діапазон

Не застосовується.

### Інтерпретація результатів тесту

Не застосовується.

### Калібрування та КЯ

Не застосовується.

### Обмеження методів тестування

Не застосовується.

### Індикатор продуктивності

Не застосовується.

### Заходи безпеки

1. Будь ласка, герметизуйте продукт належним чином після використання, щоб уникнути тривалого впливу повітря.
2. Уникайте потрапляння на шкіру. У роботі користуйтеся рукавичками.
3. Якщо реагент необережно розбризкується на шкіру, очі тощо, негайно змийте чистою водою, а якщо помилково проковтнете, зверніться до лікаря.
4. Найкращий об'єм розчину для нормальної роботи - 2/3 рівня внутрішнього об'єму.
5. Не використовуйте розчин при пошкодженні упаковки.

### Графічні символи

Етикетка	Значення
	Дата виробництва
	Діагностичний реагент In Vitro
	Виробник
	Біонебезпека
	№ лоту
	Температурний режим
	Термін придатності
	Уповноважений представник у Європейському союзі
	Кат. №
	CONFORMITE EUROPEENNE
	Об'єм
	Основний компонент

### Інформація про навчання

Будь ласка, зверніться до навчального посібника.

### Довідкова інформація

Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

### Вирішення проблем

Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

### Список літератури

Не застосовується.

### Номер дозволу на виробництво медичних пристроїв

GuangDong SFDA (Державна адміністрація харчових продуктів та лікарських засобів) отримав дозвіл на виробництво медичних пристроїв № 20041046.

### Гарантія та технічна підтримка

Якщо повторюється повідомлення про недейсні результати або вам потрібна технічна підтримка, зверніться до Центру обслуговування та підтримки користувачів Genui.

### Дата затвердження та перегляду інструкції

Дата затвердження: 06 Листопада 2015 року

Дата перегляду: 20 Жовтня 2017 року.



#### **ВИРОБНИК**

ГЕНРУІ БІОТЕК ІНК.  
4-10F, Будинок 3, Технологічний Парк Гея  
Район Гуанмін, 518106  
Шеньчжень, Китай  
Тел.: + 86-755-26835560  
Факс: + 86-755-26678789  
e-mail: [info@genrui-bio.com](mailto:info@genrui-bio.com)  
Веб: [www.genrui-bio.com](http://www.genrui-bio.com)



#### **УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул. Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

