

РЕАГЕНТ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ Coag Cleaner

Coag Cleaner

Кат. №: **h60102**

Дата випуску інструкції: **22-03-2018**
Версія **3**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. № : **h60102**

1 x 4.5 л

НАЗВА ПРОДУКТУ

Реагент для промивання Coag Cleaner.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

(Тільки для використання в In Vitro діагностиці)

Розчин Coag Cleaner - це реагент для промивання автоматичних коагуляційних аналізаторів DIAGON Coag Line для діагностичних вимірювань.

КОРОТКИЙ ОПИС ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Розчин Coag Cleaner - це ПАВ, що містить миючий розчин, який служить для щоденного обслуговування та очищення коагуляційних аналізаторів.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Розчин Coag Cleaner містить ПАВ (< 1.0%) та консервант (<0.5%).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Особа, яка встановлює Розчин Coag Cleaner, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії!
- Розчин, що вступає в контакт зі зразками та іншими матеріалами, повинен оброблятися так, ніби він здатний передавати інфекцію, і повинен бути утилізований з належними запобіжними заходами!
- Уникайте мікробного забруднення розчину, або можуть бути отримані помилкові результати!
- Всі розчини, відходи та використане одноразове лабораторне обладнання повинні розглядатися як небезпечні відходи! Їх обробка та утилізація повинні здійснюватися відповідно до встановлених правил обробки небезпечних матеріалів.
- Не використовуйте розчин після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці!

ПІДГОТОВКА

Розчин Coag Cleaner готовий до використання. Зачекайте, доки розчин не досягне робочої температури!

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

Для належного застосування Розчину Coag Cleaner, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику з експлуатації.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Розчин Coag Cleaner у закритому контейнері стабільний до дати закінчення терміну придатності, зазначеної на етикетці, при зберіганні при 15-35 °С. Стабільність після відкриття в оригінальному контейнері зазначена в таблиці нижче:

Т (°С)	15-35
Днів	60

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розчин Coag Cleaner ефективно очищає трубопроводи та резервуари з рідинними інструментами, що зберігає фонові значення та значення переносу забруднення в межах специфікації приладу.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ

- Коагуляційні реагенти.
- Автоматичний коагуляційний аналізатор DIAGON Coag Line для вимірювання.

СИМВОЛИ

	Виробник		Використати до
	Код партії		Каталоговий №
	Зберігати в сухому місці		Температурна межа
	Поводитись з обережністю		Прочитайте інструкцію щодо використання
	Не використовувати ланцюговий гачок		In vitro діагностичний медичний пристрій
	Знак CE		Ця сторона вгору



ВИРОБНИК

ДІАГОН ЛТД.
вул. Барош, 48-52,
Н-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 1 3696500
Факс: +36 1 3696301
Web: www.digon.com
e-mail: digon@diagon.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

